

СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ МД SM РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол процедурный предназначен для хранения и транспортировки медицинских принадлежностей.
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: стол манипуляционный, руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество ящиков, шт	Вес, кг
SM 1	960*х600х430	1	17,5
SM 2	960*х600х430	2	26,0
SM 6	960*х600х430	6	38,1

*-указана высота стола с установленными роликами

Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Не допускается перемещать столы манипуляционные через препятствия (пороги, ступени и прочее) без полного отрыва колес от пола. Данные действия могут привести к выходу из строя колес.

Допустимая распределенная нагрузка: на ящик **не более 15 кг**, на полку **не более 10 кг**.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Стол манипуляционный может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Стол манипуляционный устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности салазок тонким слоем смазки

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Стол манипуляционный может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Стол манипуляционный устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Стол изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата
изготовления: _____

Отметка
службы качества _____

СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ МД SM РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол процедурный предназначен для хранения и транспортировки медицинских принадлежностей.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: стол манипуляционный, руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество ящиков, шт	Вес, кг
SM 1	960*х600х430	1	17,5
SM 2	960*х600х430	2	26,0
SM 6	960*х600х430	6	38,1

*-указана высота стола с установленными роликами

Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику

Не допускается перемещать столы манипуляционные через препятствия (пороги, ступени и прочее) без полного отрыва колес от пола. Данные действия могут привести к выходу из строя колес.

Допустимая распределенная нагрузка: на ящик **не более 15 кг**, на полку **не более 10 кг**.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Стол манипуляционный может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Стол манипуляционный устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности салазок тонким слоем смазки

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Стол манипуляционный может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Стол манипуляционный устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Стол изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата
изготовления: _____

Отметка
службы качества _____