

СИДЕНЬЕ НАСАДКА ДЛЯ УНИТАЗА СО СЪЕМНЫМИ ПОРУЧНЫМИ

KZ 0932

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Сиденье-насадка для унитаза со съёмными поручнями - универсальное и надежное устройство для добавления высоты посадочному месту. Оно значительно облегчает пользование туалетом пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также в период реабилитации после перенесенных травм, хирургических операций.

Такое специализированное сиденье имеет анатомическую конструкцию и оптимальную высоту, а мягкие накладки на поручнях снижают нагрузку на мышцы. Изделие выполнено из прочного, легко моющегося, гипоаллергенного пластика. Опорные съёмные поручни с нескользящими подлокотниками обеспечивают комфорт, уверенность во время использования.

Насадка подходит для большинства унитазов, плотно фиксируется с помощью специальных креплений без применения каких-либо инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сиденье для унитаза с мягкими нескользящими подлокотниками
- Быстрая и удобная установка
- Надежная фиксация
- Подходит для большинства унитазов
- Максимальная нагрузка: 150 кг
- Легкость и мобильность в использовании

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните вдали от источников возгорания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед использованием проверьте все крепежные детали (винты, стыки, замок) на наличие трещин, поломок. Ни в коем случае не используйте накладку на унитаз при наличии любых признаков повреждения изделия.

Перед каждым использованием проверяйте, чтобы все крепежи были надежно затянутыми.

Не превышайте максимально допустимую нагрузку в 150 кг.

Не используйте устройство в иных целях, кроме указанных в инструкции.

Съёмные поручни предназначены исключительно для поддержки во время использования устройства, они не способны выдержать вес всего тела.

Люди с ограниченными физическими возможностями должны пользоваться насадкой-сиденьем под присмотром медперсонала, родственников или воспользоваться съёмными поручнями.

Ни в коем случае не использовать изделие, если оно крепко не зафиксировано на унитазе.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ОПИСАНИЕ:



Сиденье-насадка для унитаза
Съёмные поручни с мягкими накладками

СБОРКА:

1. Прикрепите поручни к нижней части насадки с помощью винтов.



2. Для установки насадки снимите с унитаза обычное сиденье с крышкой. Разместите изделие на туалете замком вперед. Оно должно ровно размещаться на ободке унитаза. Поворачивайте регулировочную ручку (находится спереди насадки) по часовой стрелке до тех пор, пока замок не захватит ободок унитаза за внутренний край. (Внимание: поворачивайте ручку замка только руками. Использование гаечного ключа или других инструментов может привести к поломке винтового узла).

3. Необходимо разместить сиденье строго по центру унитаза, отодвигая изделие как можно дальше назад. Поверните регулировочную ручку по часовой стрелке, чтобы надежно закрепить насадку. Как только почувствуется сопротивление, поверните ручку еще на 3 мм, пока она не будет совсем плотно прилегать. Не нажимайте на замок, так как это может повредить его.



РУКОВОДСТВО ПО УДАЛЕНИЮ

1. Поверните регулировочную ручку против часовой стрелки, пока крепление насадки не ослабнет.
2. Поднимите переднюю часть сиденья и потяните вперед, чтобы снять.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание: сиденье-насадка для унитаза может использоваться как обычное сиденье. Съемные поручни предназначены исключительно для поддержки во время использования устройства, они не способны выдержать вес всего тела.

1. Медленно наклонитесь к сиденью, пока задняя поверхность ваших ног не коснется его. Затем потянитесь руками назад к подлокотникам.
2. Аккуратно опуститесь на насадку, сгибая ноги в тазобедренном суставе, локтях и коленях.
3. Чтобы встать с сиденья, аккуратно подтолкните себя вперед, равномерно опираясь обеими руками на поручни. Убедитесь, что вы держите равновесие, прежде чем разжать руки и убрать их с поддерживающего устройства.

ВАЖНО: всегда перед каждым использованием проверяйте, чтобы сиденье было крепко зафиксировано, а замок всегда плотно прилегал к унитазу.

Сиденье должно быть ослаблено и снова зафиксировано, по крайней мере, 1 раз в неделю, чтобы проверить состояние изделия и обеспечить его правильную фиксацию.

УХОД И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

Для очищения насадки-сиденья пользуйтесь мягким моющим средством и теплой водой, после чего изделие необходимо насухо вытереть. Запрещено использовать органические растворители, такие как ацетон, растворители лака, жидкость для сухой чистки, бензин, скипидар, так как они могут растворить пластик.

Избегать накопления мыльной пены, которая может скользить при попадании на нее влаги.

Всегда проверяйте поручни, чтобы они были сухими. Не используйте моющие средства на основе аммиака, так как они могут ослабить подлокотники или вызывать появление трещин.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: HDPE, алюминий, пластик, ЭВА.

Цвет: белый.

Размер: 50,5 x 41,5 x 11,5 см.

Высота ручки: 26 см.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Комплектация: сиденье насадка – 1 шт., инструкция - 1 шт.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824,

fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.

Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск,

ул. Монтажных, д.9 комн.34/4., УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд

Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР,

315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938.

e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ



KZ 0536

Стул-сиденье для купания в ванной и душе



KZ 0935

Стул-сиденье со спинкой для купания в ванной и душе