


МД2 1670/SG

МД2 1780/SG

ПРОМЕТ

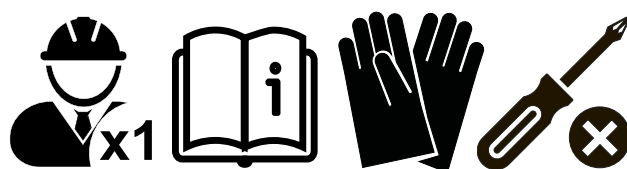





ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф предназначен для хранения медикаментов и других вещей в больницах и других лечебных заведениях.

Шкаф имеет модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

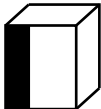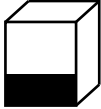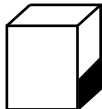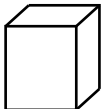
Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
МД2 1670/SG	1755	700	320	35.5
МД2 1780/SG	1850	800	400	47.8



















* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Основание	1	9	Крыша	1
2	Стенка задняя левая	1	10	Полка стальная	2
3	Стенка задняя правая	1	11	Дверца левая стальная	1
4	Стенка боковая левая	1	12	Дверь правая стальная	1
5	Стенка боковая правая	1	13	Полка стеклянная	2
6	Карниз	1	14	Дверца стеклянная	2
7	Усилитель карниза	2	15	Комплект фурнитуры	1
8	Разделитель	1			

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

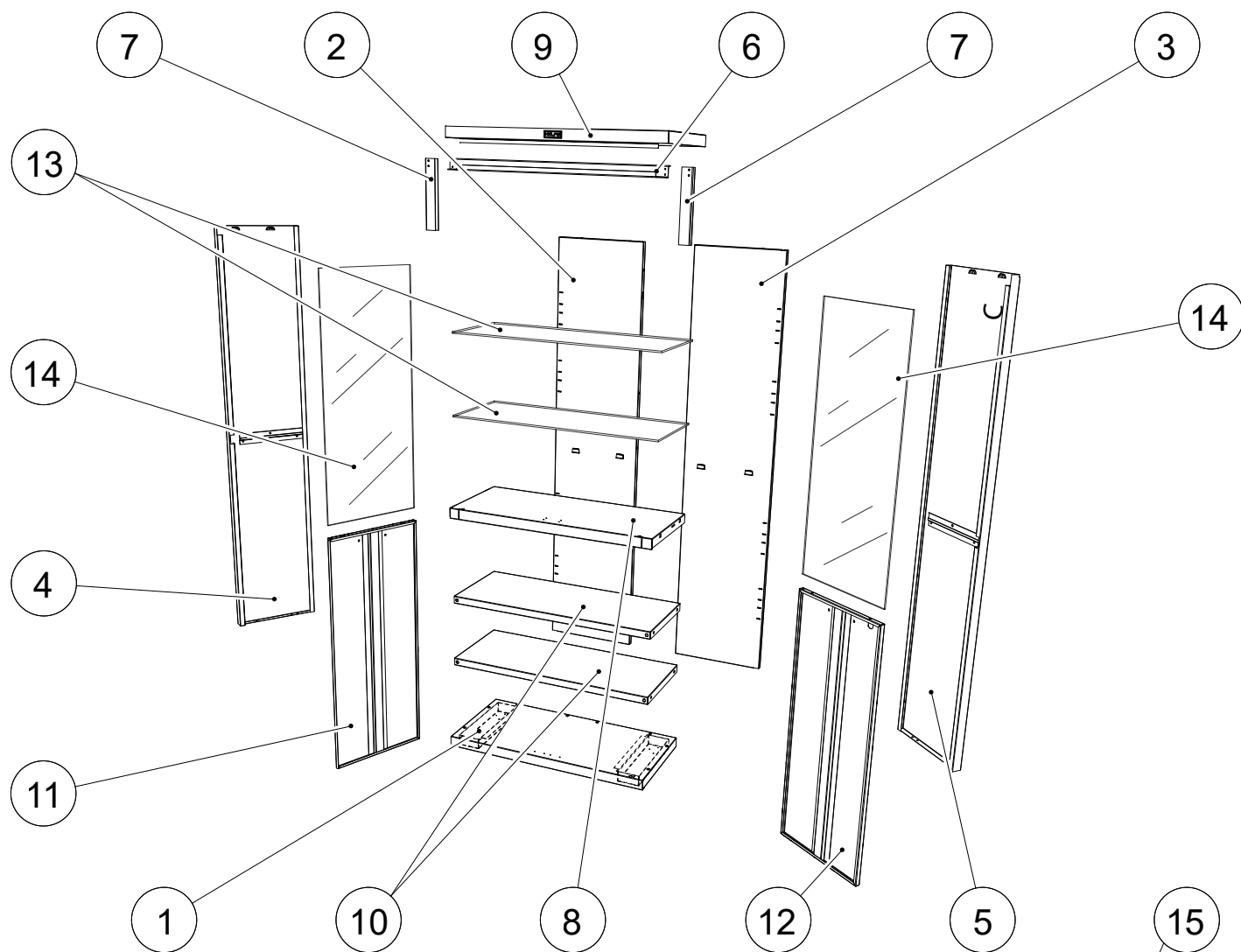

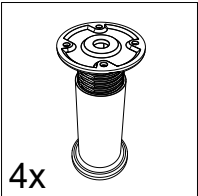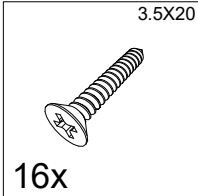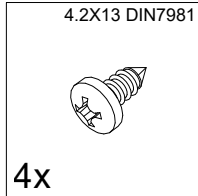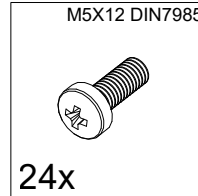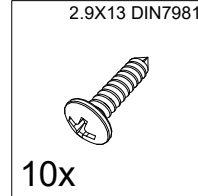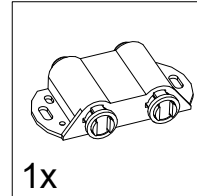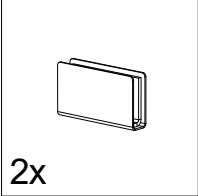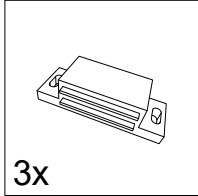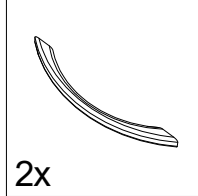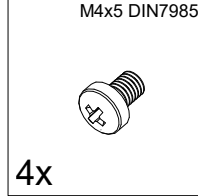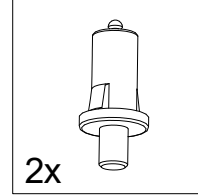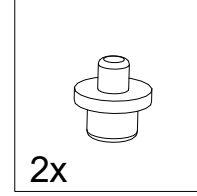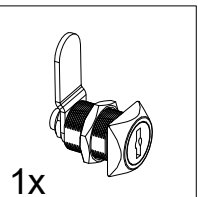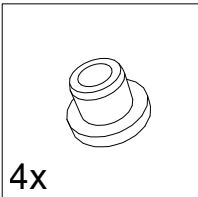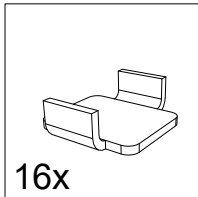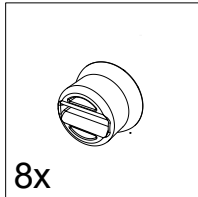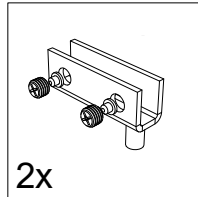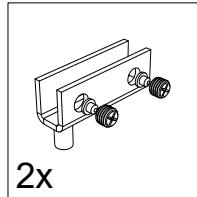
 4x	 16x	 4x	 24x	 10x	 1x
 2x	 3x	 2x	 4x	 2x	 2x
 1x	 4x	 16x	 8x	 2x	 2x

1

4x

3.5X20 DIN7982

1

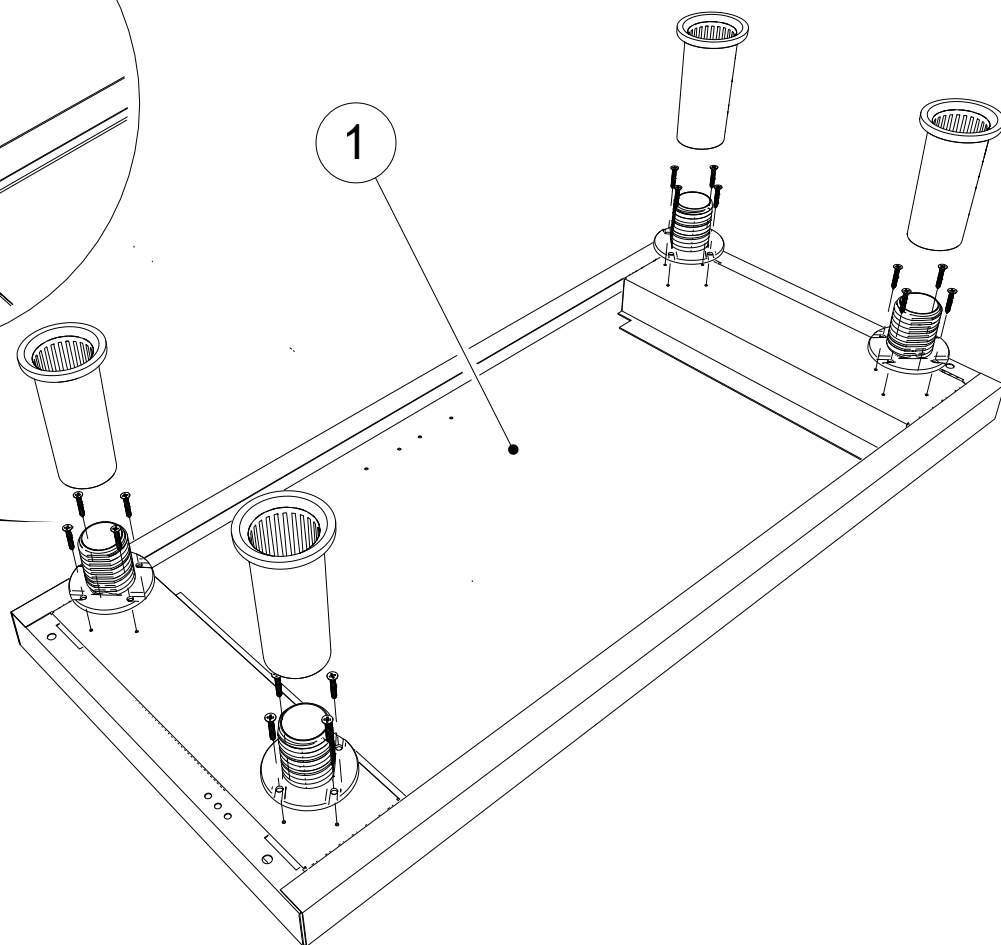


2

4x


M5X12 DIN7985

2


3

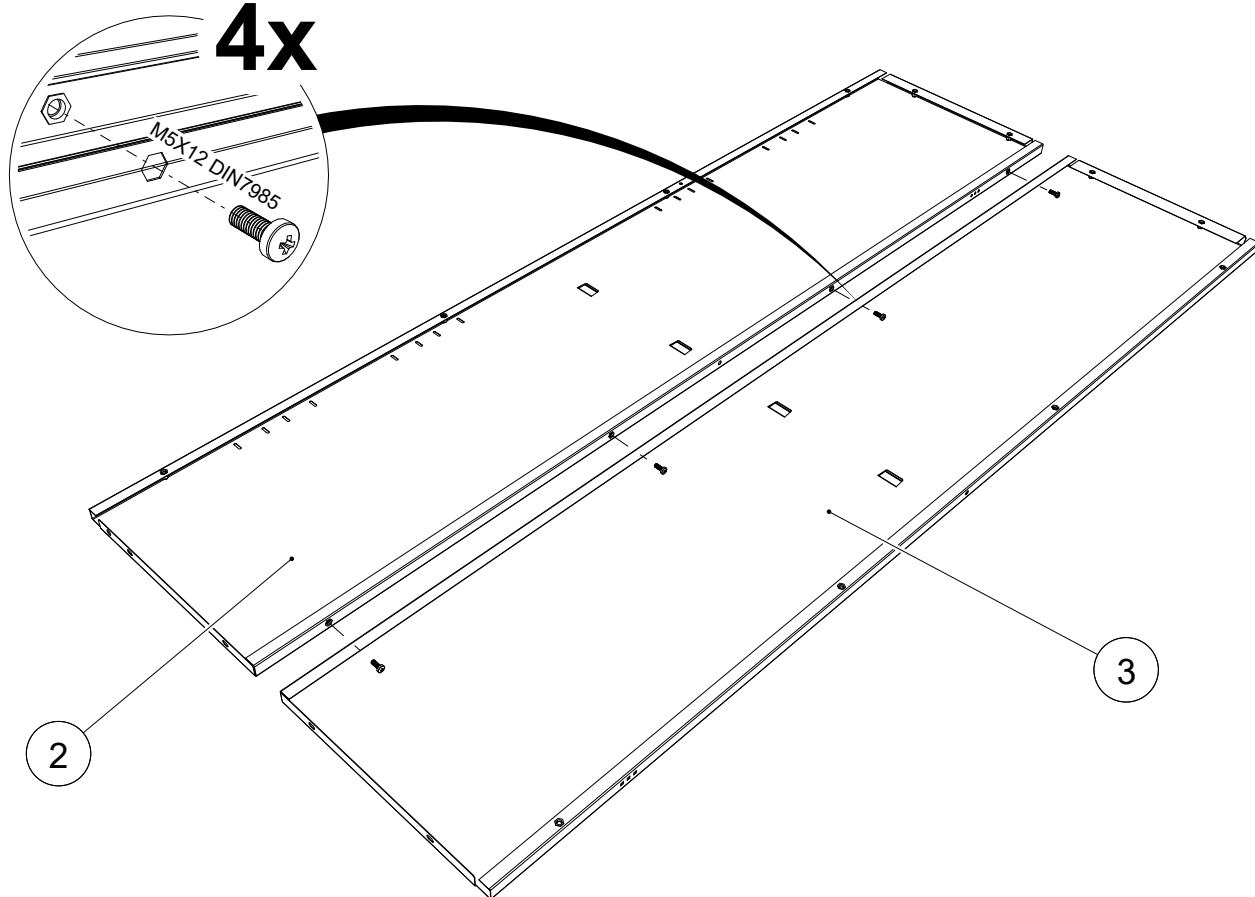

3

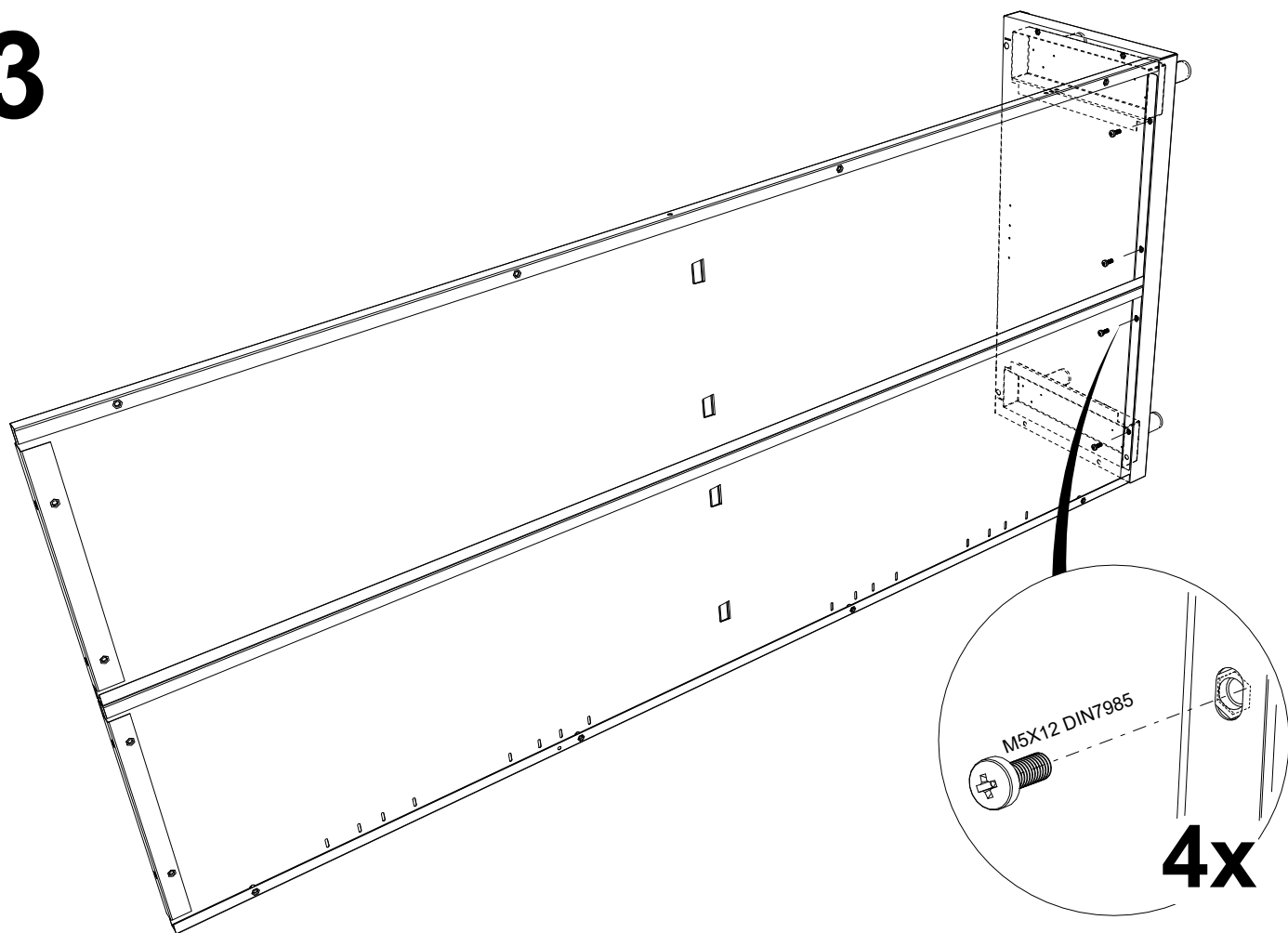


4

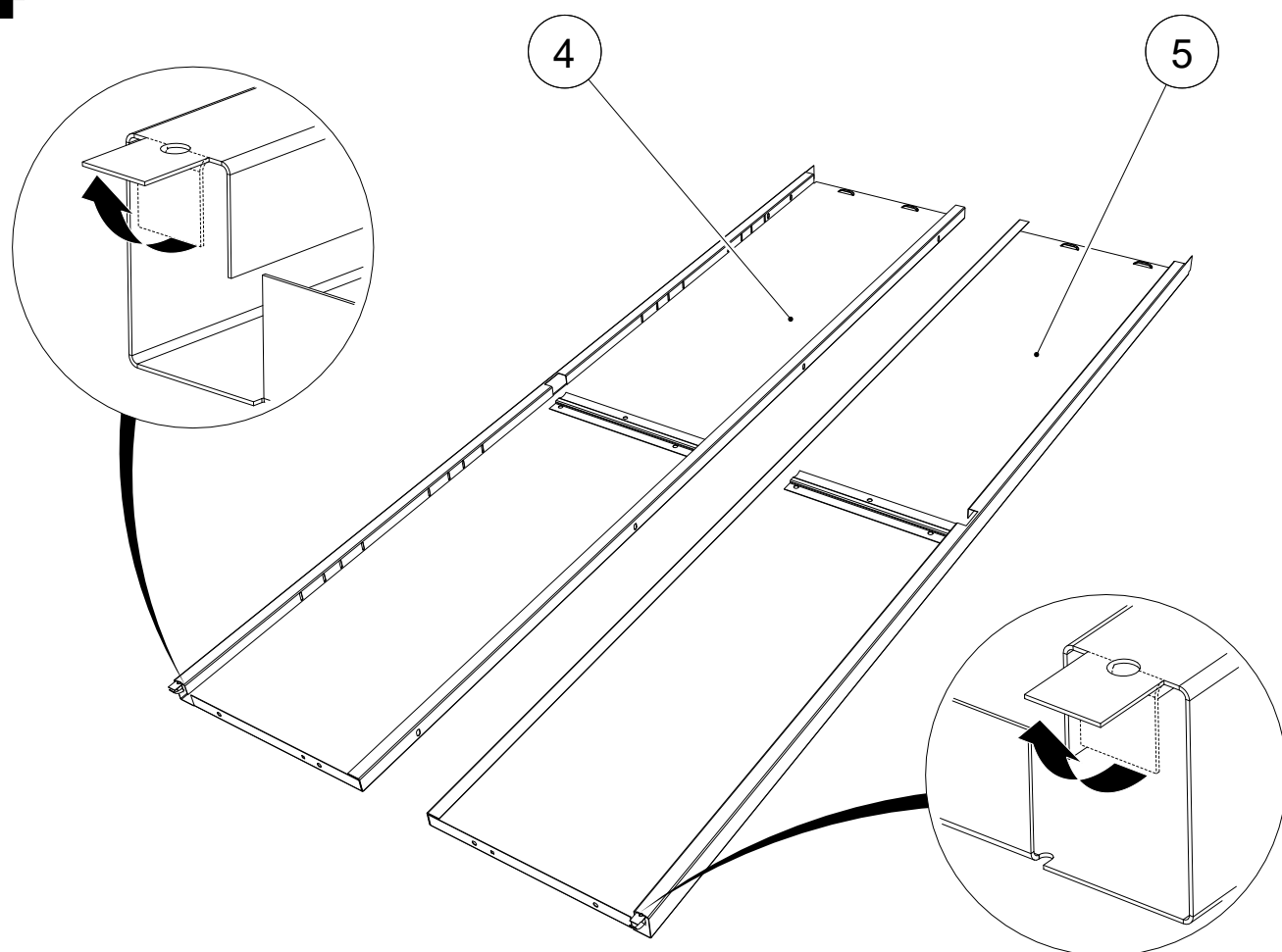


5

4

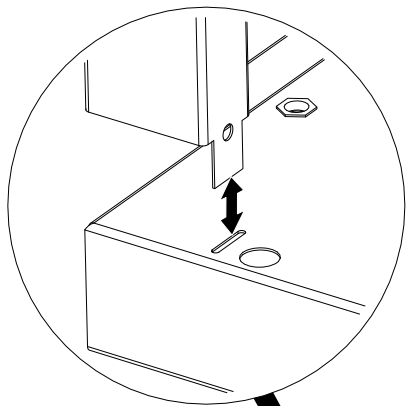


2x

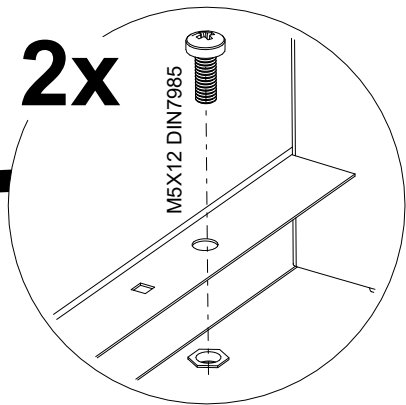




6

5

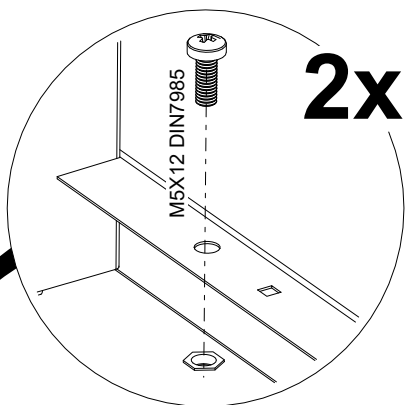


2x

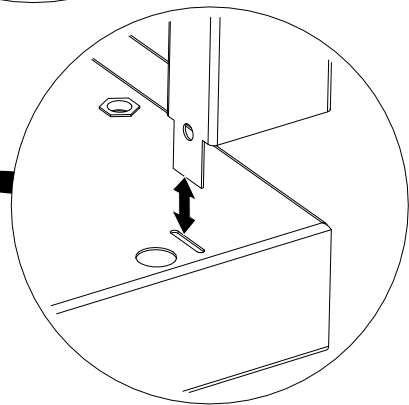


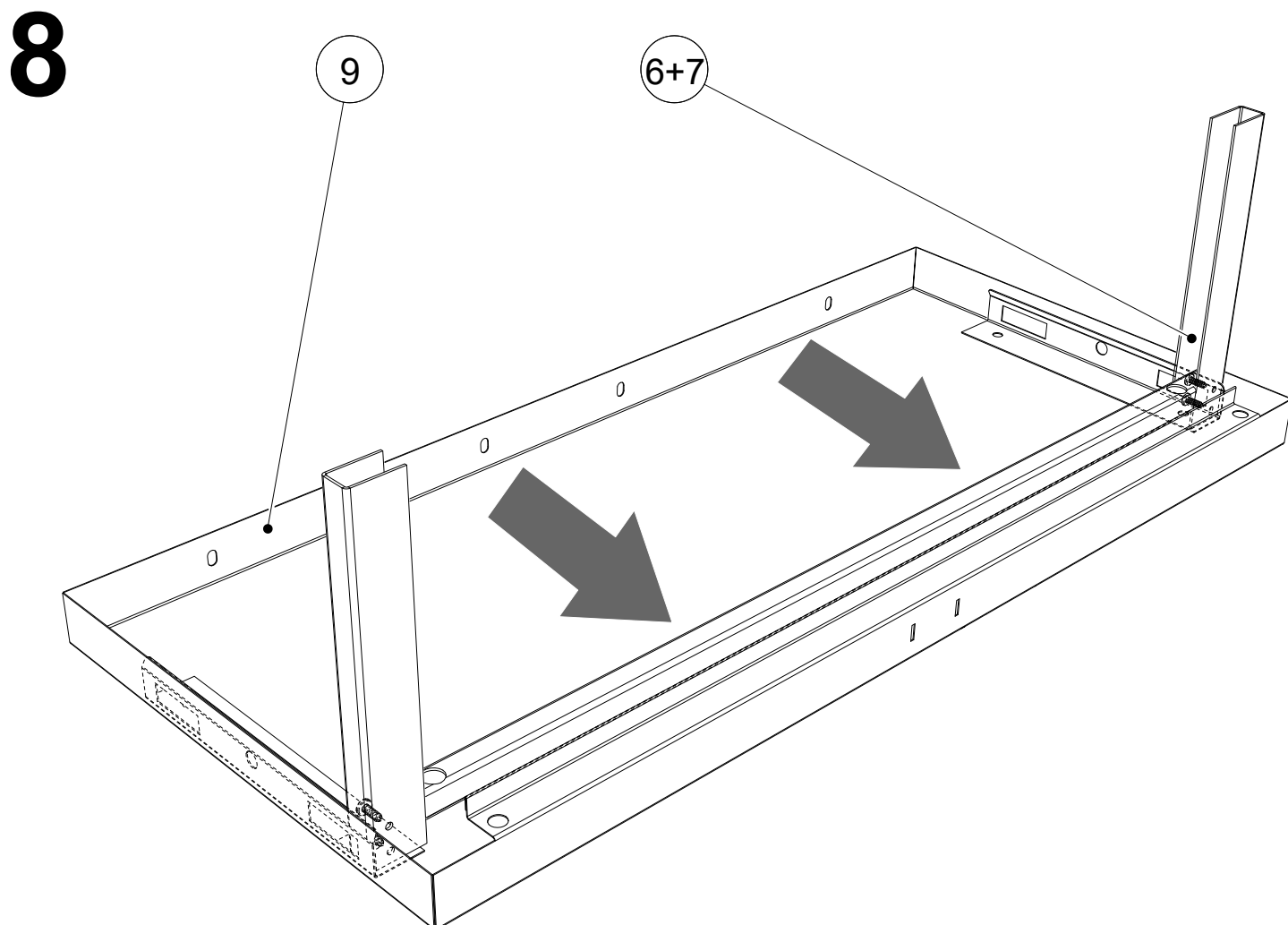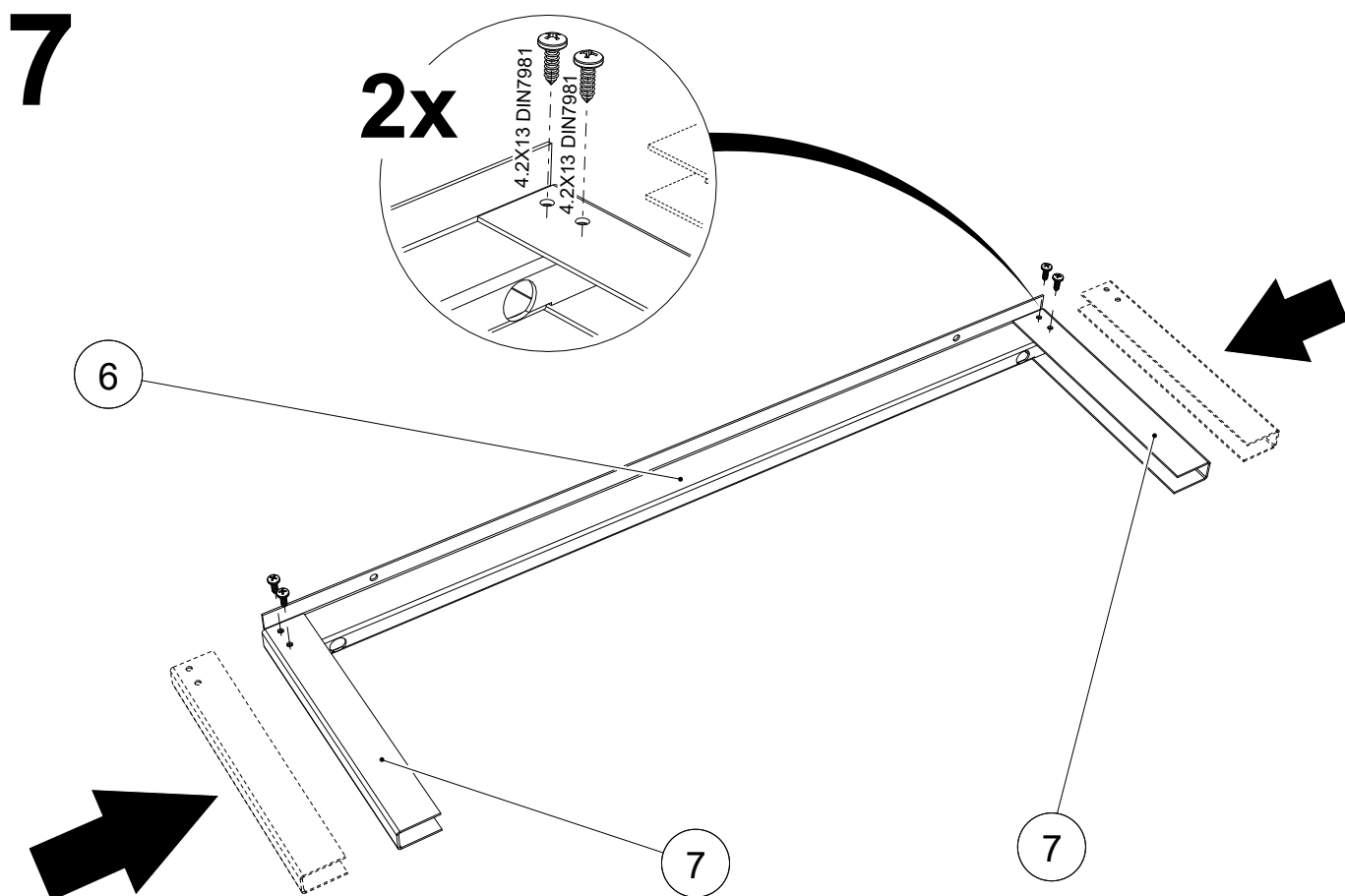





9

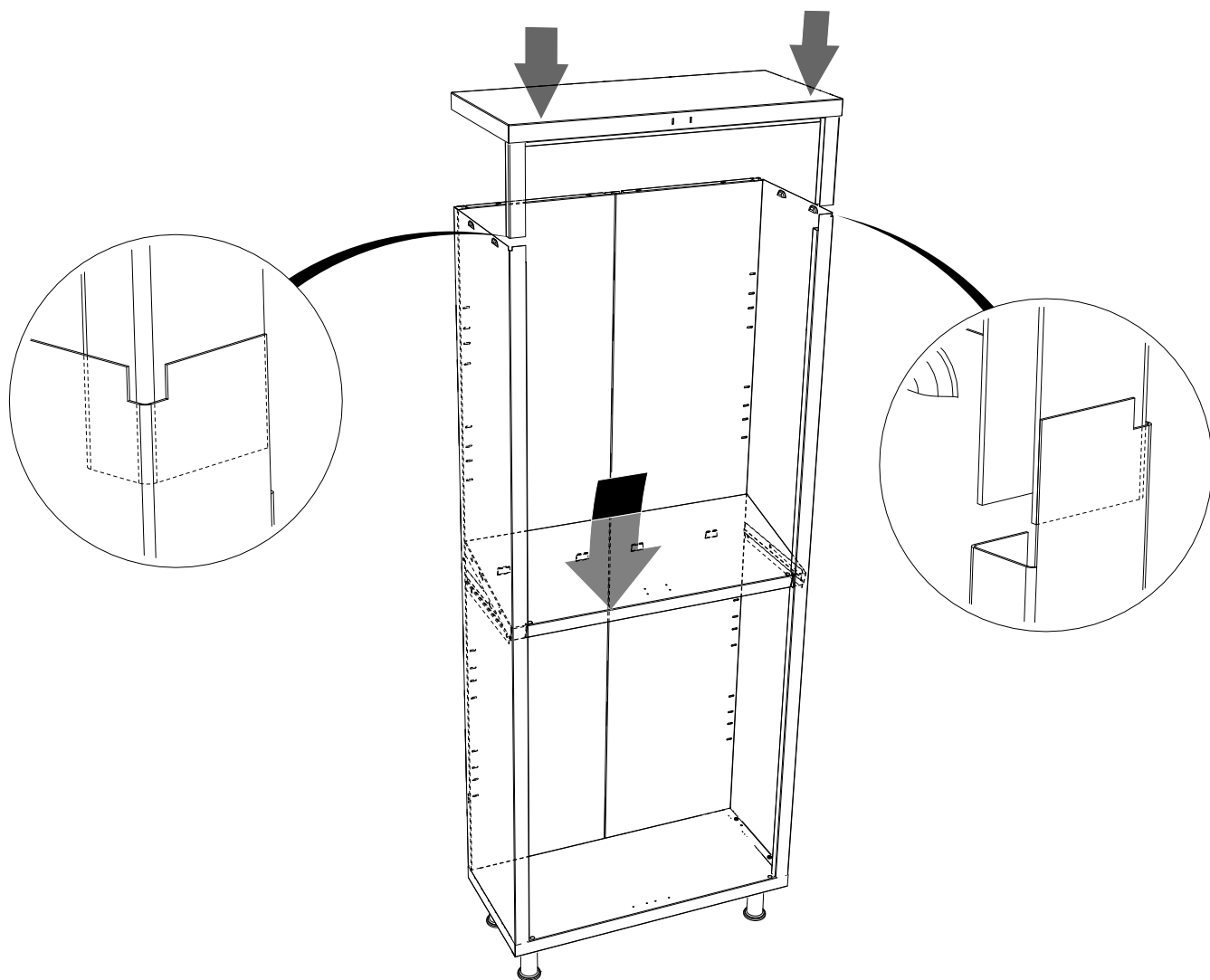

10


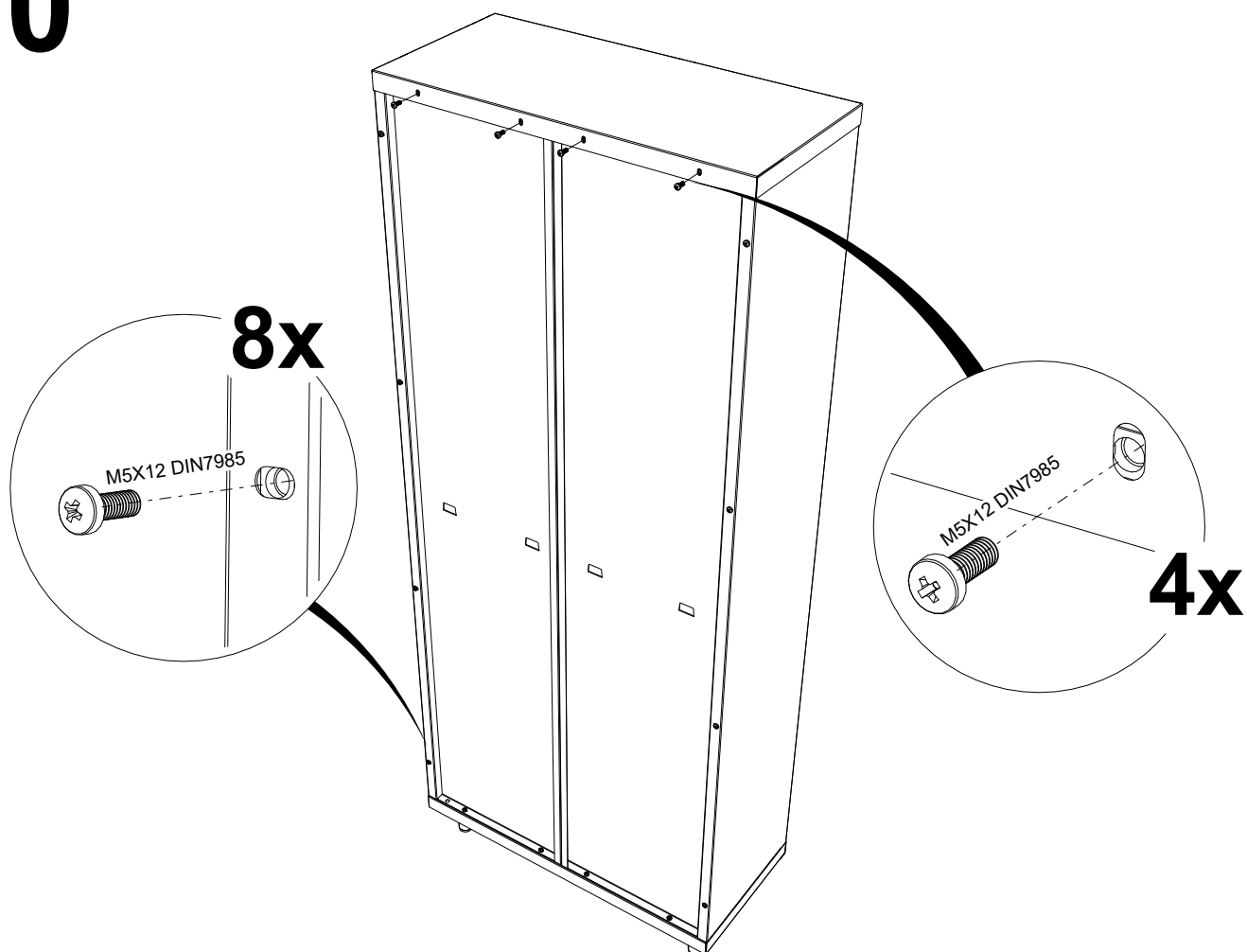


11

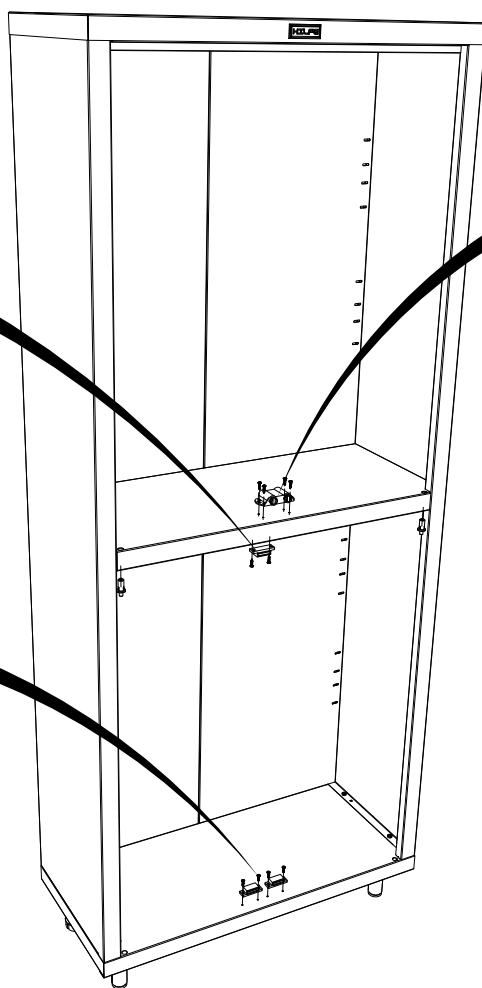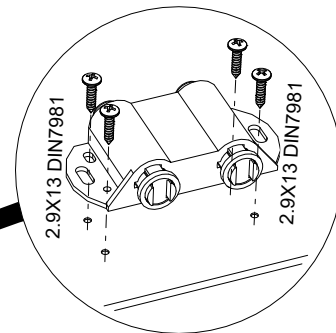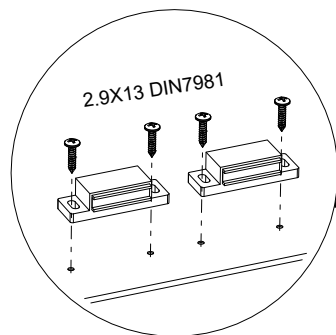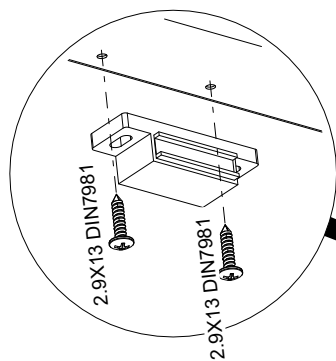


12


10

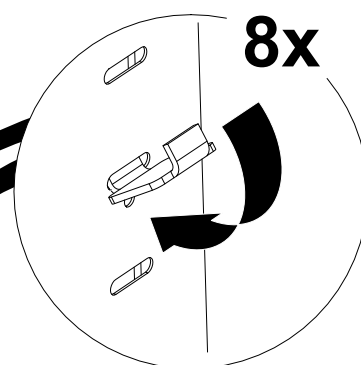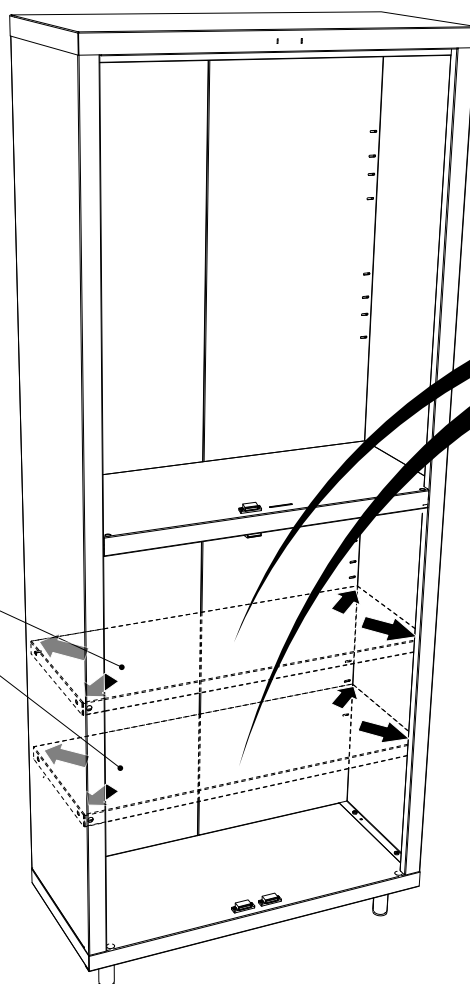


13

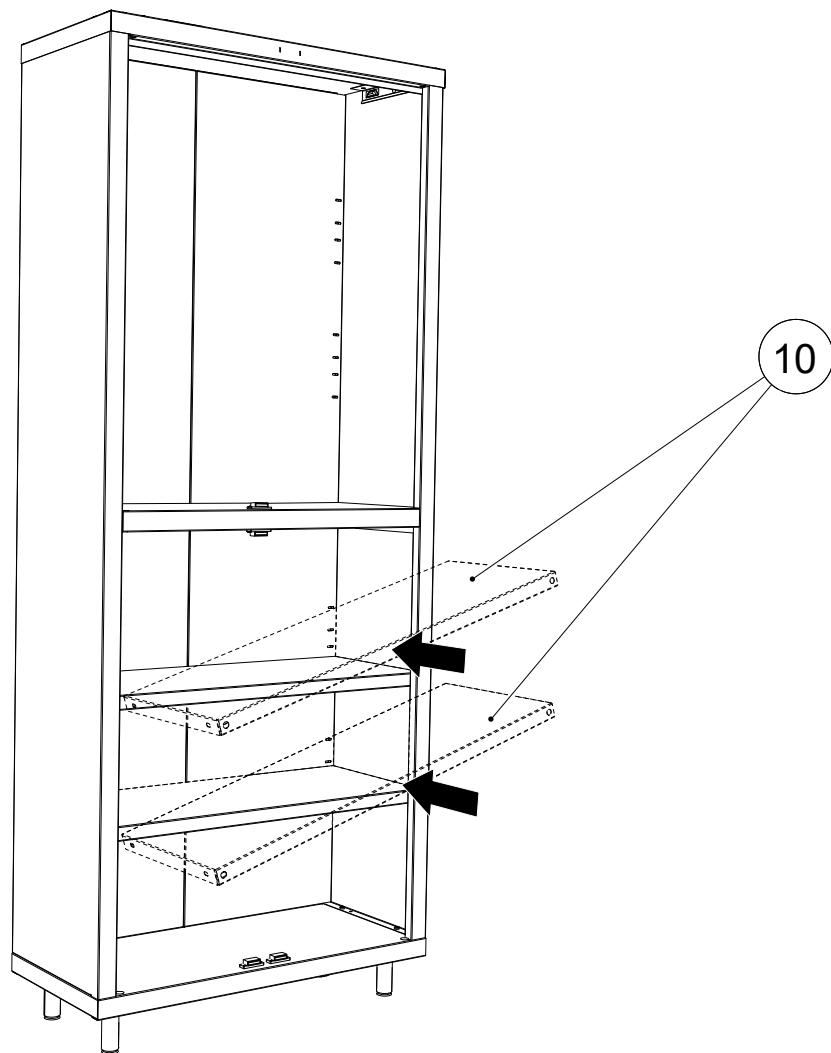


14

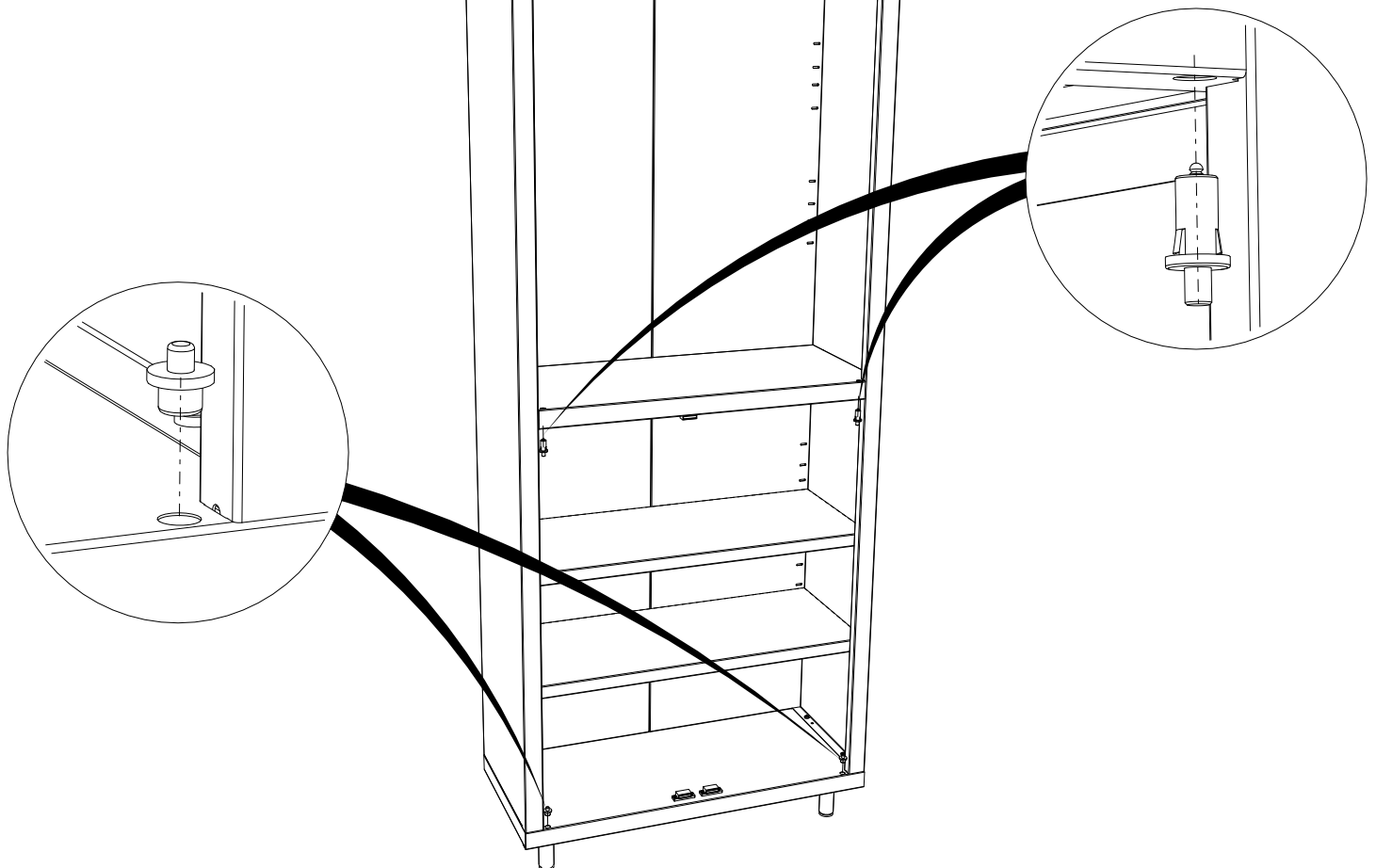


15

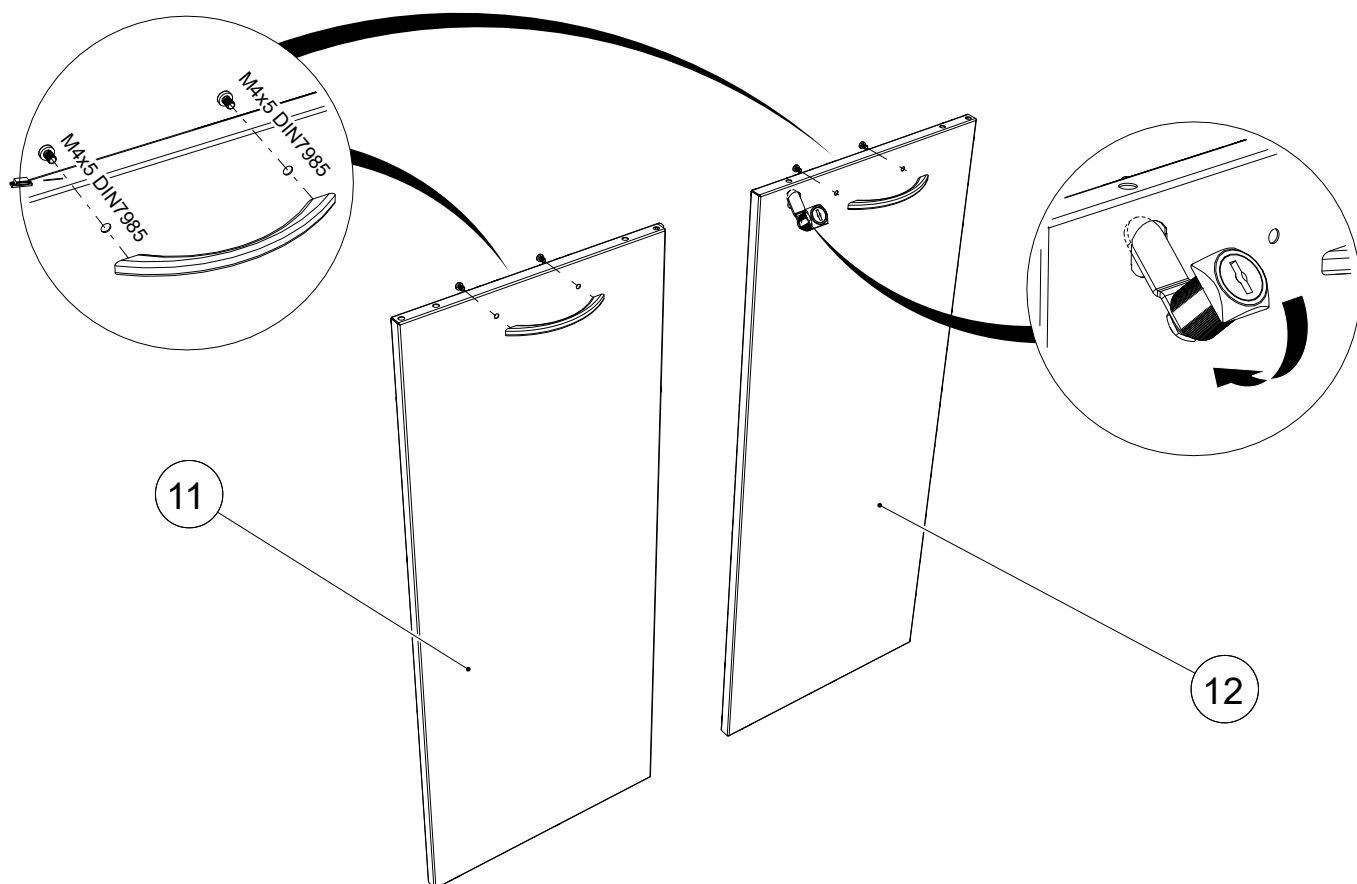


16

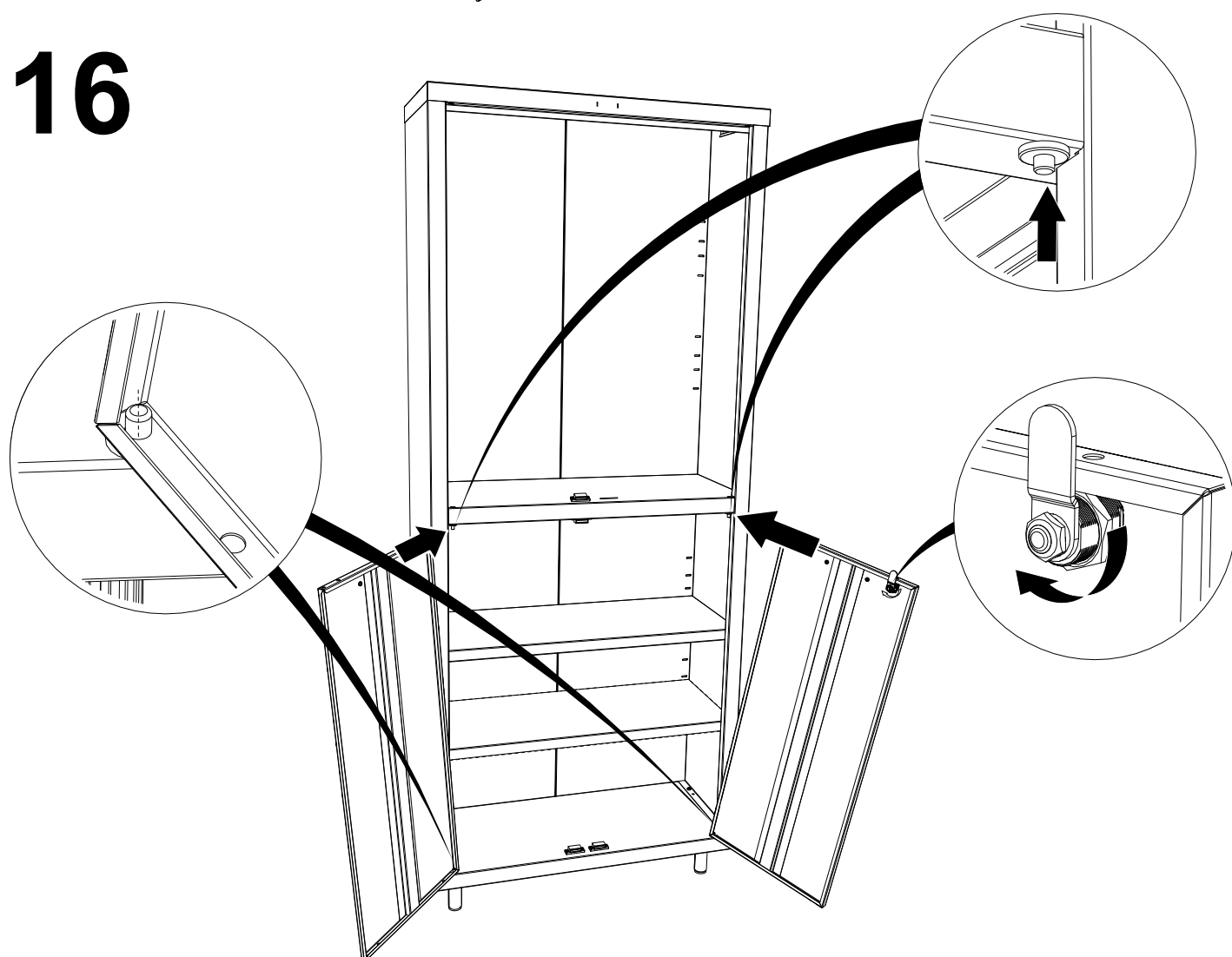



17

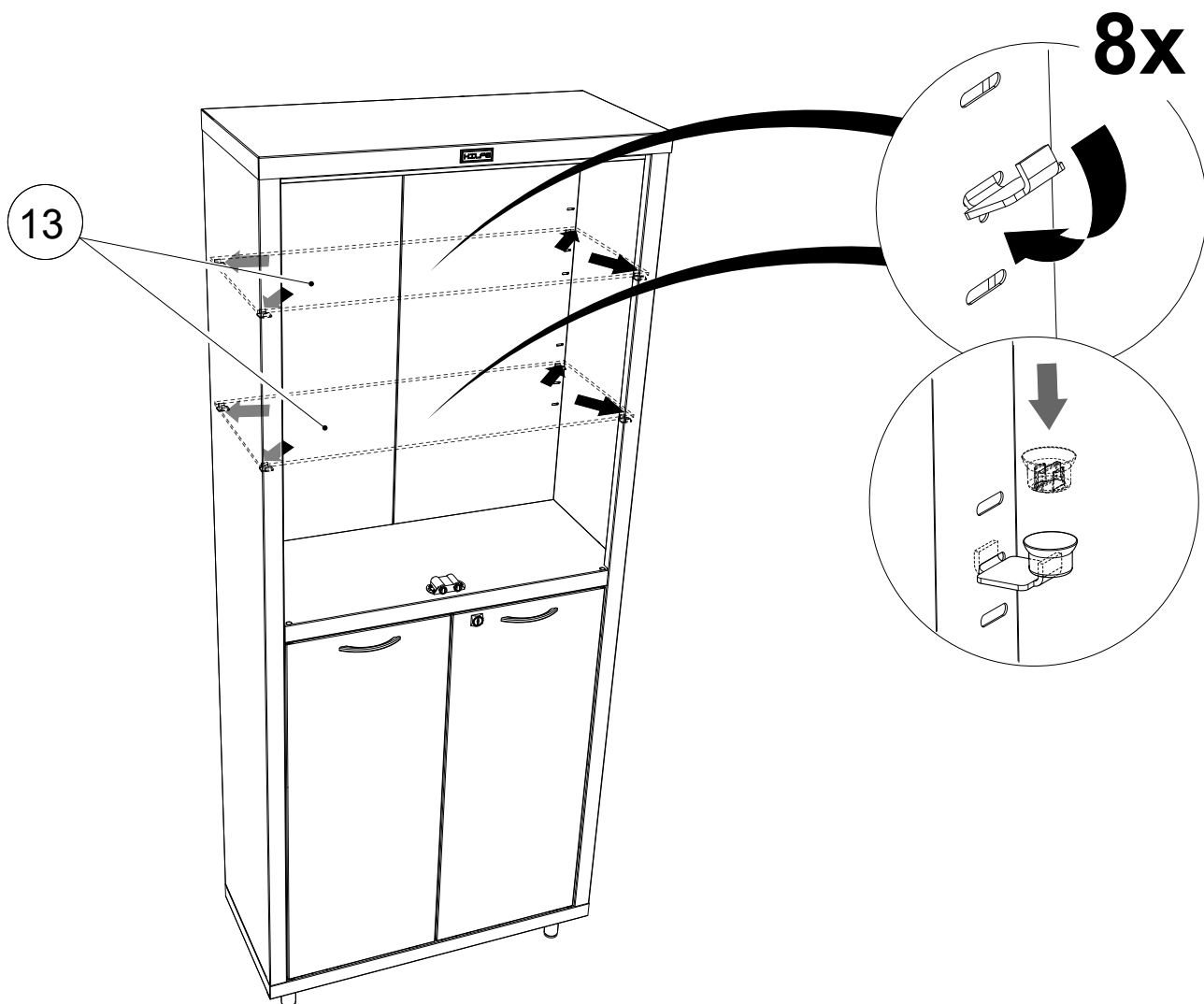


18

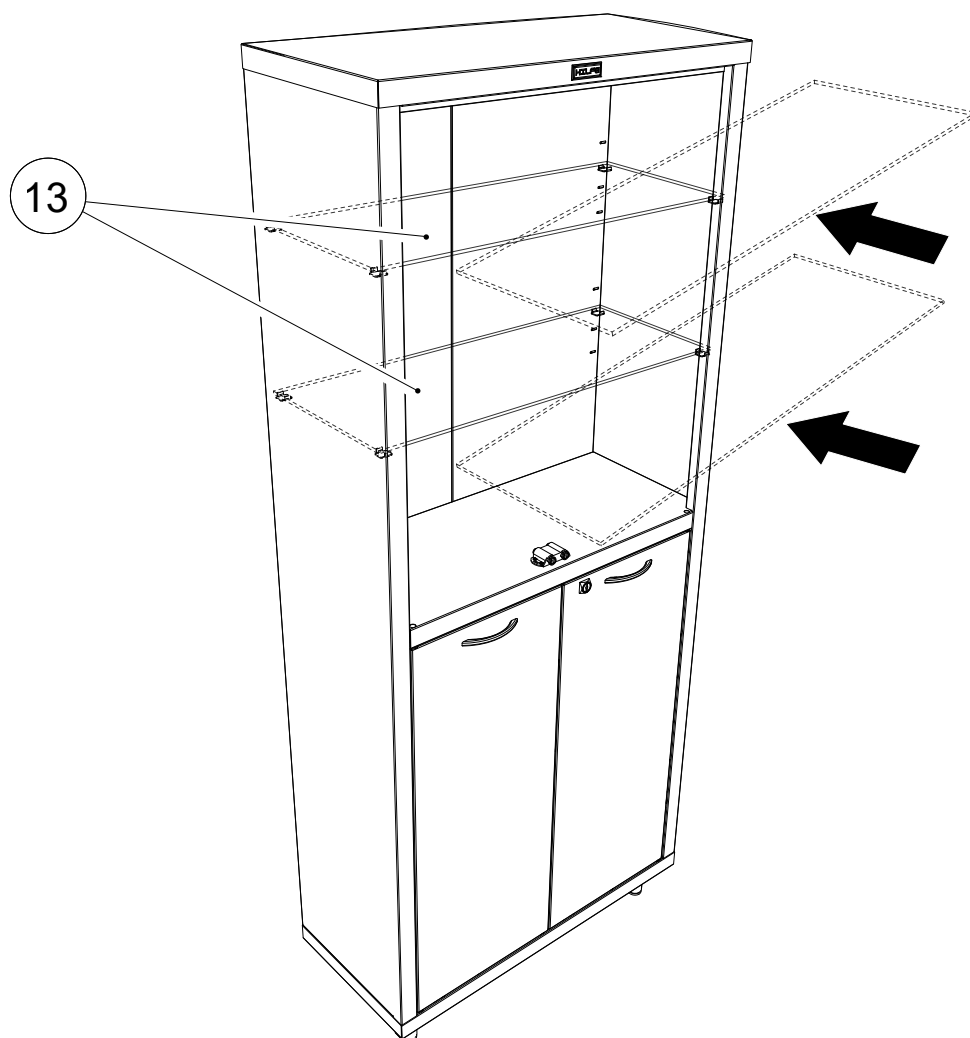


19

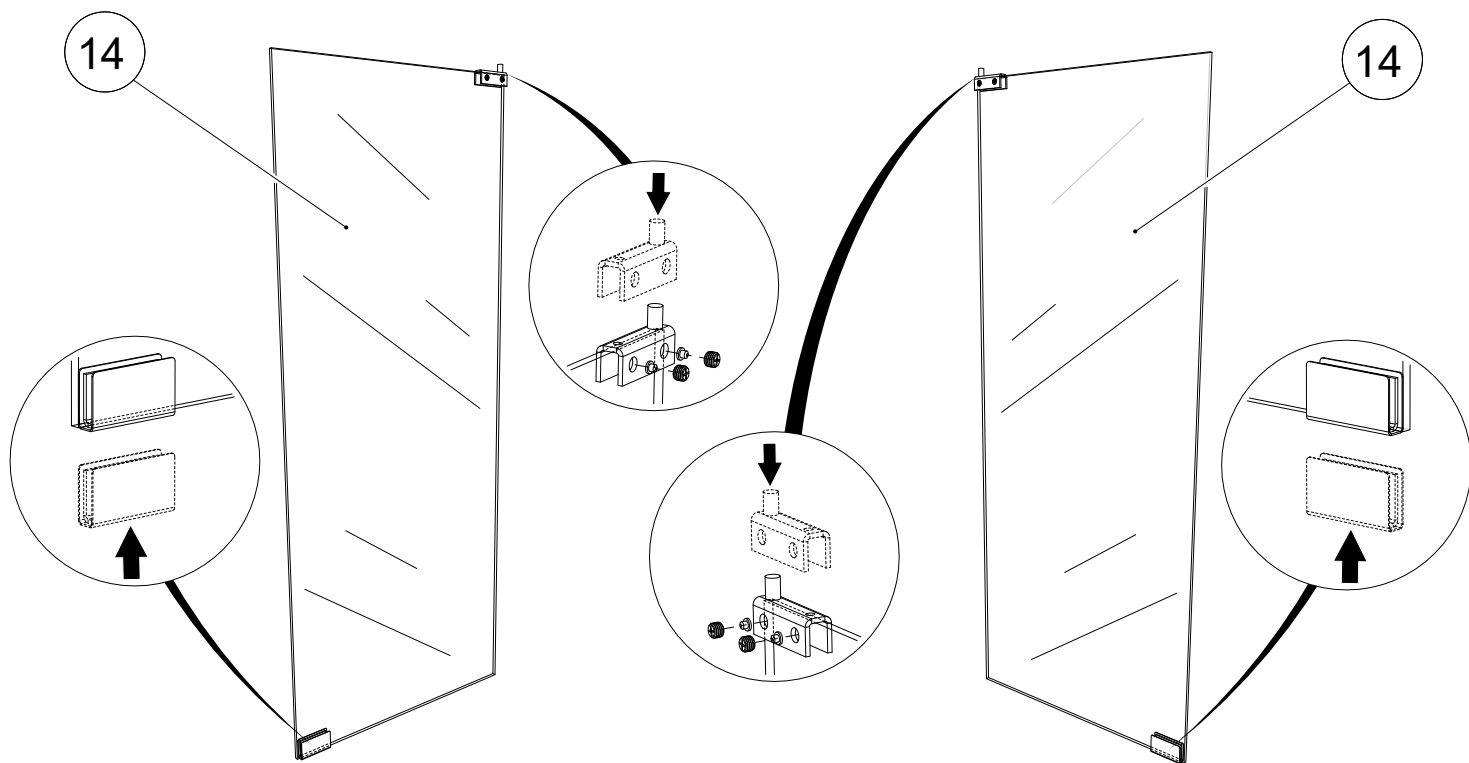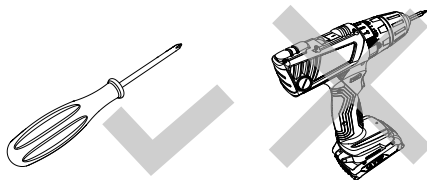

20

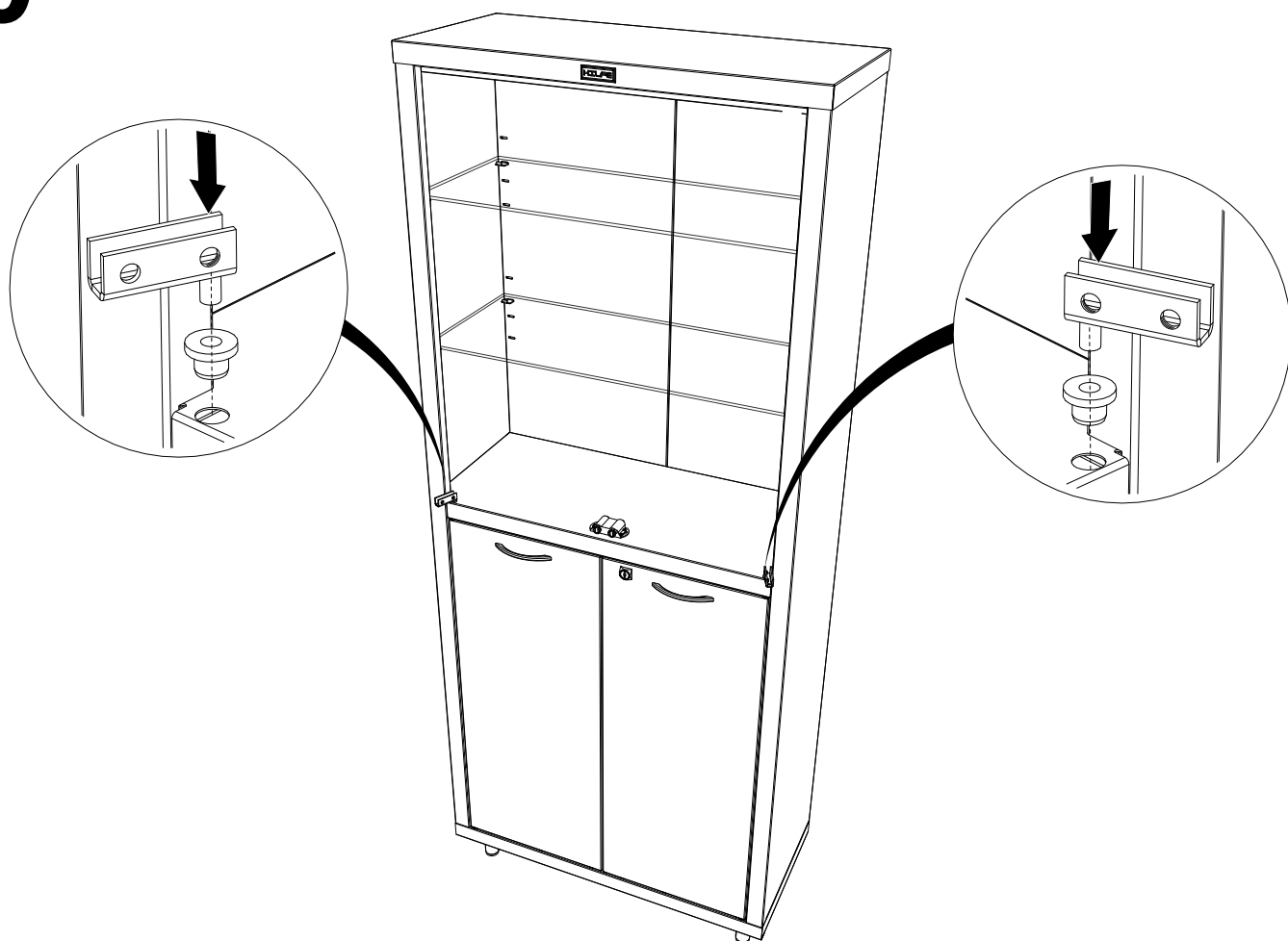

21

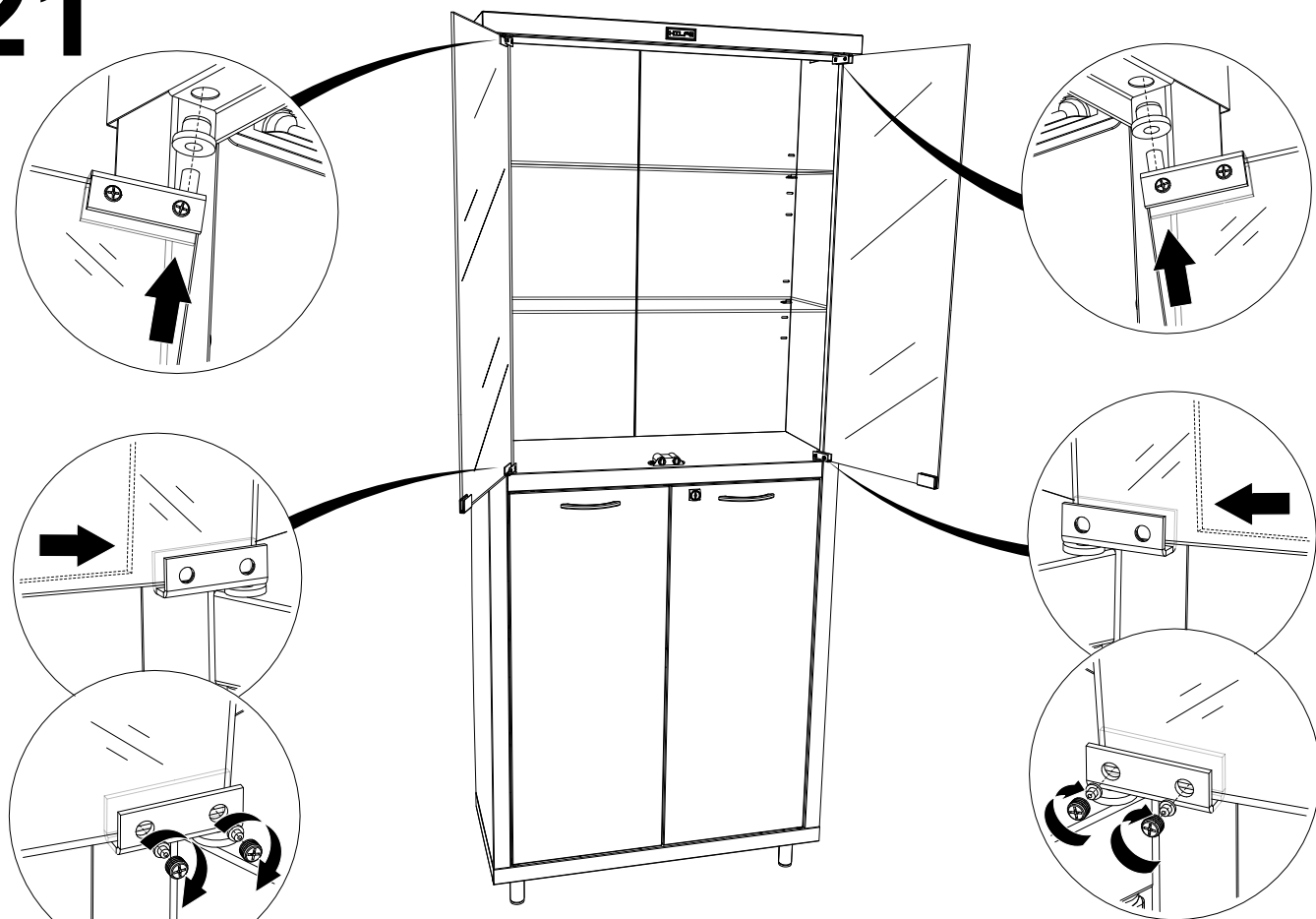

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Шкаф устанавливают на ровную горизонтальную поверхность для обеспечения свободного открывания дверей. С помощью регулируемых опор вы можете выставить уровень шкафа.

Согласно Сан ПИН 2.1.3.2630 – 10, п. 1.4.3 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены.

(Под перестановкой понимается: перемещение изделия на расстояние с полным отрывом опор шкафа от пола. Не допускается осуществлять перестановку шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола).

Максимальная распределенная нагрузка на стальную полку – 30кг

Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10кг

Максимальная нагрузка на шкаф – 200кг

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем силиконовой смазки.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.