



Руководство пользователя
Рециркулятор воздуха
бактерицидный
Mbox

ARIA-15UV ☐

ARIA-30UV ☐

ARIA-45UV ☐

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за покупку прибора торговой марки Mbox.

Перед использованием прочитайте внимательно данное Руководство пользователя.

Бактерицидный УФ рециркулятор Mbox предназначен для обеззараживания воздуха, также может быть использован в присутствии людей в производственных, бытовых, медицинских и жилых помещениях. Обеспечивает снижение уровня инфекционных заболеваний, обеззараживая воздух в помещениях с помощью ультрафиолетового излучения.

Меры предосторожности:

1. Оберегайте прибор от соприкосновения с водой.
2. Не используйте воду, моющие средства и легковоспламеняющиеся жидкости для чистки прибора.
3. Не перекрывайте входные и выходные отверстия для воздуха.
4. Не пользуйтесь рециркулятором, если он поврежден.
5. Не пытайтесь разобрать, починить или переоборудовать прибор.
6. Если прибор долго не используется, отключите его от сети.
7. Если очиститель начал издавать не привычный звук, появился запах гари и дым, немедленно выньте вилку питания из розетки безопасным способом и обратитесь в центр технической поддержки.
8. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на заводском шильде.
9. Поврежденный электрический провод необходимо заменить.
10. Убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 20 см от стен или предметов, а верхний воздуховод не менее 30 см.
11. Отключите питание и достаньте вилку питания из розетки перед чисткой или обслуживанием прибора.

Руководство по установке:

Начало использования:

Внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

1. Достаньте прибор из упаковки и протрите его мягкой чистой сухой тряпкой.
2. В зависимости от необходимости прикрутите к прибору ножки для установки на столе или другой поверхности или выберите колеса для мобильности прибора и установки на пол.

3. Убедитесь, что для нормальной работы прибора есть необходимое пространство не менее 20 см с каждой стороны.

4. При необходимости вы можете повесить рециркулятор на стену посредством крючка в комплекте.

5. Прежде чем вставлять вилку, убедитесь, что розетка питания и кабель соответствуют требованиям.

6. При использовании рециркулятора, будет доноситься небольшой жужжащий звук, это нормально.

Порядок работы:

1. Подключите устройство к электрической розетке.

2. Нажмите на клавишу вкл / выкл на корпусе прибора, чтобы включить рециркулятор, прибор начнет работать.

3. Нажмите клавишу вкл / выкл, чтобы выключить работающую машину.

4. После 3-х часов работы рециркулятора отключите его на 10 минут, включите снова.

5. В таком режиме прибор способен работать 24 часа.

Чистка и техническое обслуживание:

1. Отключите рециркулятор от сети.

2. Мягкой чистой тряпкой протрите всю поверхность прибора, отдельные пятна очистите влажной тряпкой, не используйте агрессивные чистящие средства и легковоспламеняющиеся жидкости.

3. Очистите воздухозаборник и выпускное отверстие прибора мягкой щеткой.

Основные технические характеристики:

Модель	ARIA-15UV □	ARIA-30UV □	ARIA-45UV □
Входное напряжение	220 В	220 В	220 В
Мощность лампы, Вт	15	15	15
Длина волны UV свечения, нм	253,7	253,7	253,7
Количество ламп в приборе	1	2	3
Цоколь лампы	G13	G13	G13
Ресурс лампы, часов	до 9000	до 9000	до 9000
Производительность прибора, м3/час	50	80	100
Потребляемая мощность, Вт не более	25	50	60
Уровень шума, дБ	30	36	50

Обрабатываемая площадь* м2/час	30	60	80
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	500xD100	505x170x130	505x170x130
Вес, кг	2+/-0,2	2,7+/-0,2	3,2+/-0,2
Счетчик наработки часов	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐
Колеса	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐
Тележка	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐
Фильтр	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐	Да ☐ Нет ☐

*При расчете площади обрабатываемого помещения необходимо учитывать ряд факторов: высота потолков, геометрия помещения, темп поступления загрязнений, требуемый уровень защиты, время обработки помещения. Оптимальным является установка одного рециркулятора на указанную площадь с высотой потолка 2,5-3 метра при условии достаточно свободного движения воздуха так, чтобы весь объем воздуха мог пройти через рециркулятор

Проблемы и решения:

Проблемы	Решения
Прибор не включается	Проверьте подключение к электрической сети, включите прибор.
Не работает вентилятор	Проверьте подключение к электрической сети, включите прибор.

Техническая поддержка:

В случае поломки или неисправности устройства, вы можете обратиться в сервисный центр.

Всю необходимую контактную информацию вы можете найти на:
www.deerp2000.ru/contacts

Адреса авторизованных сервисных центров:
www.deerp2000.ru/about/guarantees

Авторские права:

© ООО ТПК "ДИИП 2000" 2020.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании ООО ТПК "ДИИП 2000".

Комплектность поставки рециркулятора:

1. Рециркулятор – 1 шт.
2. Ножки – 4 шт.
3. Гайки – 4 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и функций прибора без предварительного уведомления покупателя. Представленные изображения могут отличаться от оригинала.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДИИП 2000"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121096, Россия, город Москва, улица Кастанаевская, дом 24

Основной государственный регистрационный номер 1107746813712.

Телефон: 84957395302 Адрес электронной почты: sales@deep2000.ru

в лице Генерального директора Ульихина Владимира Николаевича

заявляет, что Приборы электрические не бытового назначения: очистители воздуха закрытого типа бактерицидные для работы в присутствии людей, торговой марки: Mbox, моделей: ARIA-15UV, ARIA-30UV, ARIA-45UV, ARIA-45T, ARIA-60T, ARIA-80T, ARIA-100R, ARIA-300R, ARIA-600R, ARIA-900R, ARIA-1200R, ARIA-100C, ARIA-600C, ARIA-900C, ARIA-1200C, ARIA-1A, ARIA-2A, ARIA-3A.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДИИП 2000"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 121096, Россия, город Москва, улица Кастанаевская, дом 24

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.90.11-004-68833332-2020 «Обеззараживать воздуха «Мbox» не бытового назначения».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421392009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 255-11-20/12-ЦТ, 256-11-20/12-ЦТ от 27.11.2020 года, выданных испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» ООО «ПрофНадзор» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

№1 на 1 листе. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.12.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

Ульихин Владимир Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АД07.В.04880/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.12.2020

Контактная информация:

Поставщик: ООО ТПК «ДИИП 2000»

Адрес: 121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 24

Телефон:

+7 (495) 739 53 02

+7 (495) 647-24-55 (56) (техническая поддержка)

Электронная почта:

sales@deep2000.ru

service@deepsc.ru (техническая поддержка)

