


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
PLANTA MF-30

FOOT MASSAGER
PLANTA MF-30

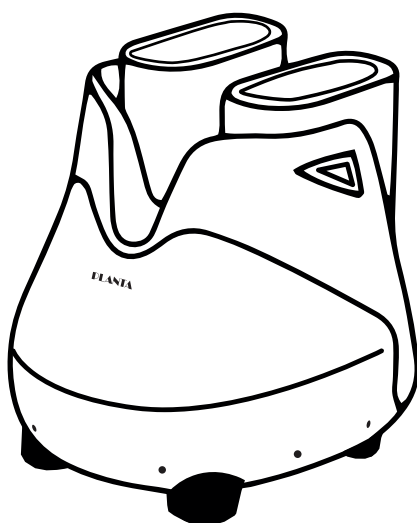

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукции Planta. **Массажер для ног PLANTA MF-30** – это эффективный массажер для ног, сочетающий в себе несколько видов массажа, идеально продуманный для удобного использования.

С помощью массажера MF-30 Вы сможете наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Устройство используется для роликового и воздушно-компрессионного массажа стоп, лодыжек и икр. Массаж с его помощью оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение и повышает тонус в мышцах, помогает избавиться от усталости и боли в ногах. Функция подогрева стимулирует кровообращение. Массажер MF-30 идеально подходит для тех, кто долго стоит на работе на ногах и испытывает дискомфорт, а также для тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях.

Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta-russia.ru



ВНИМАНИЕ! МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Примечание: пользователь понимает и принимает все риски, связанные с использованием массажера не по назначению, а также без соблюдения техники безопасности и иных правил применения, прописанных в данном руководстве по эксплуатации.

Требования по безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности!

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Прибор предназначен для личного использования.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали прибора находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности не используйте прибор и обратитесь в службу поддержки.
- Ремонт прибора могут проводить только квалифицированные специалисты. Не открывайте прибор самостоятельно. Отдельные компоненты этого прибора нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Никогда не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали прибор в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки прибора. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии. Лучше проводить чистку влажной тканью.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в прибор.
- Никогда не используйте данный прибор совместно с электромедицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данный прибор может стать причиной нарушений в работе вышеуказанного медицинского оборудования.
- Если Вы не используете прибор, отключите его от сети.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.

- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 15 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте массажер во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не размещайте массажер на солнце или в месте с температурой выше 40 °С, так как это приведет к выцветанию материала, из которого изготовлен массажер, а также к возможному выведению из строя внутреннего механизма.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под основание массажера.
- Не наступайте на массажные ролики, так как это может привести к их поломке.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, любые болезни позвоночника, суставов и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на ногах имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.

Примечание! Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

 **Не рекомендуется проводить процедуру дольше 15 минут!**

Акупунктурный роликовый массаж стоп

Принцип работы прибора основан на вращающихся массажных роликах, оказывающих благотворное воздействие на определённые точки подошвы стоп. Сами ролики разной конфигурации, что позволяет массировать все зоны стопы. Специальная роликовая конфигурация воздействует на всю поверхность ступни, боковой дуги, подошвы.

Компрессионный массаж стоп, икр и голеней

В результате компрессии улучшает кровообращение, что позволяет избавиться от отеков, спазмов мышц, неприятных ощущений, усталости. Такой прессомассаж усиливает эффективность роликового массажа.


Массаж Шиацу

Воздействует на акупунктурные точки, гармонизирует работу организма и приводит в тонус.

Оказывает общее релаксирующее действие, снимает напряжение, способствует улучшению сна.

Рефлексология


Ступня является наиболее сложной чувствительной областью человеческого тела, на которой находятся рефлексорные зоны нервной системы. Зачастую массаж стопы с воздействием рефлексотерапии на акупунктурные точки избавляет от общей усталости, устраняет боль и помогает болезням покинуть ваш организм. Суть метода в том, что под воздействием на отдельные части тела происходит оздоровление всего организма в целом.

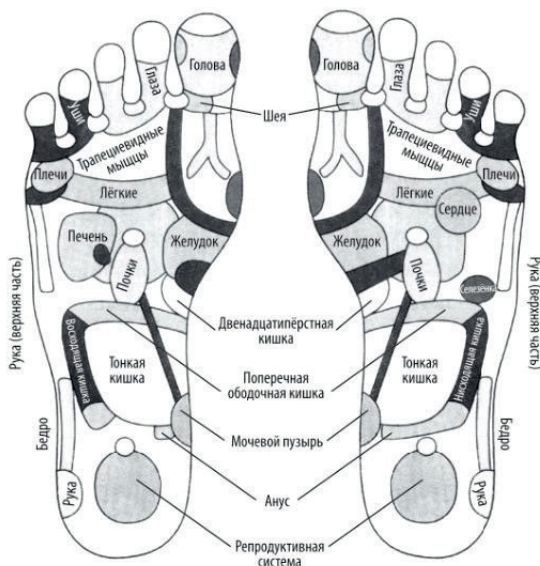


Описание массажера

Комплектация:

1. Массажер для ног
2. Пульт дистанционного управления
3. Адаптер питания

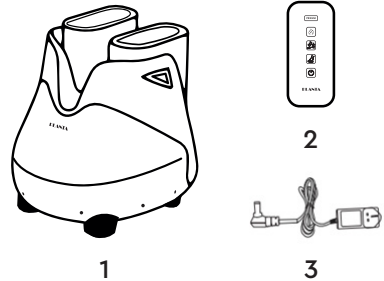


Описание массажера:

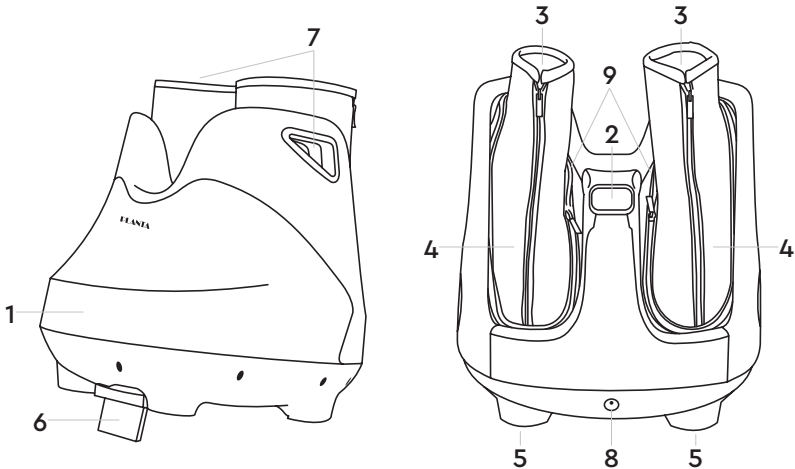

1. Корпус массажера для ног
2. Панель управления
3. Отверстия для ног
4. Лимфодренажные сапоги с молниями-застежками
5. Ножки массажера
6. Складная подножка для регулировки угла наклона массажера
7. Ручки для переноски массажера
8. Разъем для подключения адаптера питания
9. Молнии для крепления лимфодренажных сапог к массажеру

Панель управления

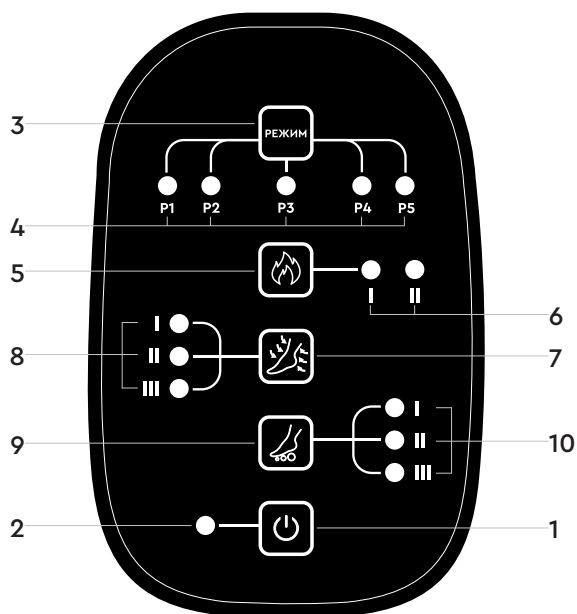

1. Кнопка включения/выключения массажера.

Для включения массажера нажмите на кнопку один раз. При этом все кнопки на панели управления подсветятся и массажер перейдет в режим ожидания.

Для выключения устройства нажмите на кнопку повторно.

2. Индикатор, отображающий включение устройства в сеть/активацию работы ручного или одного из автоматических режимов массажера.

При подключении массажера к сети индикатор будет мигать.

При активации работы ручного или одного из автоматических режимов индикатор будет гореть постоянно.

3. Кнопка выбора одного из 5 автоматических режимов массажа.

При однократном нажатии на кнопку активируется автоматический режим №1 – роликовый массаж стоп в комбинации с воздушно-компрессионным массажем на 1-ом уровне интенсивности без активации подогрева (см. «Описание автоматических режимов»).

Нажимайте кнопку , пока на панели не загорится индикатор нужного режима массажа. Выбранный режим автоматически начнет работу.

Внимание! После выбора автоматического режима Вы можете изменить интенсивность воздействия компрессионного воздействия и активировать один из 2-ух уровней подогрева. При этом интенсивность роликового массажа будет оставаться постоянной – на 1-ом уровне интенсивности.

4. Индикаторы, отображающие активацию выбранного автоматического режима массажа.

После активации выбранного режима массажа на панели будет гореть световой индикатор, соответствующий данному режиму.

5. Кнопка активации и выбора одного из 2-ух уровней интенсивности подогрева.

По умолчанию функция подогрева не активна при включении прибора. При желании после выбора автоматического режима массажа Вы можете установить желаемый уровень подогрева – I или II.

Для активации функции подогрева на 1 уровне интенсивности нажмите кнопку 1 раз. При этом на панели будет гореть световой индикатор функции подогрева:



Для активации 2-го уровня интенсивности подогрева нажмите кнопку повторно. При этом на панели будут гореть оба индикатора функции подогрева:




Для отключения функции подогрева нажмите кнопку еще раз. Световые индикаторы данной функции погаснут.

6. Индикаторы, отображающие активацию выбранного уровня интенсивности функции подогрева.

7. Кнопка активации и выбора одного из 3-х уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа.

По умолчанию работа каждого из 5-ти автоматических режимов начинается на 1 уровне интенсивности воздействия. При этом на панели будет гореть световой индикатор «I».

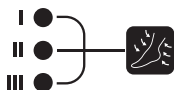

После выбора автоматического режима массажа Вы можете установить желаемый уровень интенсивности воздушно-компрессионного воздействия – I, II или III, а также отключить данную функцию.

Для активации 2 уровня интенсивности нажмите кнопку один раз, при этом на панели загорится световой индикатор «II».

Для активации 3 уровня интенсивности нажмите кнопку еще раз, при этом на панели загорится световой индикатор «III».

Последующее нажатие на кнопку приведет к отключению функции воздушно-компрессионного воздействия. При этом световые индикаторы данной функции погаснут.

Для повторной активации данной функции нажмите на кнопку еще раз.

8. Индикаторы, отображающие активацию выбранного уровня интенсивности воздушно-компрессионного массажа.

9. Кнопка активации и выбора одного из 3-х уровней интенсивности роликового массажа.

По умолчанию работа каждого из 5-ти автоматических режимов предусматривает роликовый массаж на постоянном уровне интенсивности 1.

Интенсивность роликового массажа можно активировать только в ручном режиме. Для этого после активации работы прибора нажмите кнопку  и выберите необходимый уровень интенсивности:




Для активации 2 уровня интенсивности нажмите кнопку один раз, при этом на панели загорится световой индикатор «II».

Для активации 3 уровня интенсивности нажмите кнопку еще раз, при этом на панели загорится световой индикатор «III».

10. Индикаторы, отображающие активацию выбранного уровня интенсивности роликового массажа.

Пульт управления

Примечание! Для удобства управления массажером Вы можете использовать пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки. При этом следить за активированным режимом массажа, а также выбранными функциями и уровнями интенсивности их воздействия Вы можете с помощью световых индикаторов на панели управления.

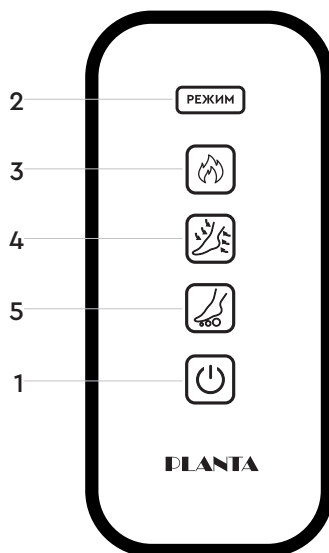

1. Кнопка включения/выключения прибора.

Для включения массажера нажмите на кнопку один раз. При этом все кнопки на панели управления подсветятся и массажер перейдет в режим ожидания.

Для выключения устройства нажмите на кнопку повторно.

2. Кнопка выбора одного из 5 автоматических режимов массажа.

При однократном нажатии на кнопку активируется автоматический режим №1 – роликовый массаж стоп в комбинации с воздушно-компрессионным массажем на 1-ом уровне интенсивности без активации подогрева (см. «Описание автоматических режимов»).

Нажимайте кнопку , пока на панели не загорится индикатор нужного режима массажа. Выбранный режим автоматически начнет работу.

Внимание! После выбора автоматического режима Вы можете изменить интенсивность воздействия компрессионного воздействия и активировать один из 2-ух уровней подогрева. При этом интенсивность роликового массажа будет оставаться постоянной – на 1-ом уровне интенсивности.

После активации выбранного режима массажа на панели будет гореть световой индикатор, соответствующий данному режиму.

3. Кнопка активации и выбора одного из 2-ух уровней интенсивности подогрева.

По умолчанию функция подогрева не активна при включении прибора. После выбора автоматического режима массажа Вы можете установить желаемый уровень подогрева – I или II.

Для активации функции подогрева на 1 уровне интенсивности нажмите кнопку 1 раз.

При этом на панели будет гореть световой индикатор функции подогрева:




Для активации 2-го уровня интенсивности подогрева нажмите кнопку повторно. При этом на панели будут гореть оба индикатора функции подогрева:



Для отключения функции подогрева нажмите кнопку еще раз. Световые индикаторы данной функции погаснут.

4. Кнопка активации и выбора одного из 3-х уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа.

По умолчанию работа каждого из 5-ти автоматических режимов начинается на 1 уровне интенсивности воздействия. При этом на панели будет гореть световой индикатор «I».

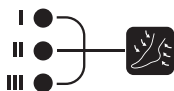

После выбора автоматического режима массажа, Вы можете установить желаемый уровень интенсивности воздушно-компрессионного воздействия – I, II или III, а также отключить данную функцию.

Для активации 2 уровня интенсивности нажмите кнопку один раз, при этом на панели загорится световой индикатор «II».

Для активации 3 уровня интенсивности нажмите кнопку еще раз, при этом на панели загорится световой индикатор «III».

Последующее нажатие на кнопку приведет к отключению функции воздушно-компрессионного воздействия. При этом световые индикаторы данной функции погаснут.

Для повторной активации данной функции нажмите на кнопку еще раз.

5. Кнопка активации и выбора одного из 3-х уровней интенсивности роликового массажа.

По умолчанию работа каждого из 5-ти автоматических режимов предусматривает роликовый массаж на постоянном уровне интенсивности 1.

Интенсивность роликового массажа можно активировать только в ручном режиме. Для этого после активации работы прибора нажмите кнопку  и выберите необходимый уровень интенсивности:



Для активации 2 уровня интенсивности нажмите кнопку один раз, при этом на панели загорится световой индикатор «II».

Для активации 3 уровня интенсивности нажмите кнопку еще раз, при этом на панели загорится световой индикатор «III».

Примечание! В массажере предусмотрено 5 автоматических режимов, различающихся по зоне воздействия воздушно-компрессионных подушек, а также по скорости их сжатия и расширения.

По умолчанию каждый из 5-ти режимов начинает работу на 1-ом уровне интенсивности воздействия воздушно-компрессионных подушек и массажных роликов.

При желании после активации выбранного автоматического режима Вы можете изменить интенсивность давления воздушно-компрессионных подушек и активировать один из 2-ух уровней интенсивности подогрева. При этом интенсивность роликового массажа будет оставаться постоянной – на 1-ом уровне интенсивности.

Режим 1. Интенсивный. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области икр, лодыжек и стоп с одинаковой интенсивной скоростью сжатия и расширения компрессионных подушек в комбинации с роликовым массажем.

Режим 2. Расслабление. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области лодыжек и стоп с одинаковой средней скоростью сжатия и расширения компрессионных подушек в комбинации с роликовым массажем.

Примечание! В данном режиме воздушно-компрессионный массаж икр не активен.

Режим 3. Тонизирующий. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области икр, лодыжек и стоп с переменным сжатием и расширением компрессионных подушек на средней скорости в комбинации с роликовым массажем.

Режим 4. Бодрящий. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области икр, лодыжек и стоп с одинаковой средней скоростью сжатия, но различной скоростью расширения компрессионных подушек в комбинации с роликовым массажем.

Режим 5. Релакс. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области икр, лодыжек и стоп с одинаковой медленной скоростью сжатия и расширения в комбинации с роликовым массажем.

Эксплуатация прибора

На время проведения процедуры рекомендуется не надевать на ноги одежду, содержащую крупные пуговицы, молнии и другие элементы, которые будут мешать при проведении массажа.


Продолжительность каждого сеанса массажа составляет 15 минут, по истечению которых прибор прекращает работу и переходит в режим ожидания.

Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. При первом появлении боли или дискомфорта, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом!

⚠ Внимание! Используйте прибор только в положении сидя. Запрещается вставать на прибор!

Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.

1. Извлеките массажер из коробки. Удалите все упаковочные материалы.
2. Внимательно осмотрите массажер на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в службу поддержки.
3. Поставьте массажер на полу перед собой, сядьте.
4. При желании вы можете изменить угол наклона массажера для более комфортного положения ног. Для этого выдвиньте складную подножку, расположенную в основании массажера вперед:

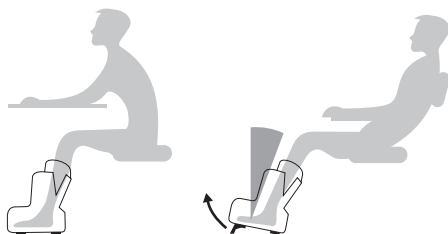

5. Поместите обе ступни в отверстия для ног. Подключите адаптер питания к штепсельному гнезду электропитания на устройстве.

На панели загорится и будет мигать световой индикатор кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:



6. Нажмите на кнопку  на панели управления или пульте ДУ.
На панели подсветятся все кнопки. Массажер перейдет в режим ожидания
7. Вы можете выбрать ручной режим работы или один из 5 автоматических режимов работы.

- **Ручной режим:**

После перехода прибора в режим ожидания с помощью кнопок , ,  выберите комфортный для Вас уровень интенсивности подогрева, воздействия массажных роликов и уровень давления воздушно-компрессионных подушек.

- **Автоматический режим:**

Для выбора одного из 5 автоматических режимов работы устройства нажимайте кнопку  на панели управления или на кнопку  на пульте ДУ, пока на

панели не загорится световой индикатор выбранного режима.

При этом начинается обратный отсчет времени работы прибора – 15 минут.

8. При желании с помощью кнопки  на панели управления или пульте активируйте функцию подогрева и выберите комфортный для Вас уровень интенсивности подогрева (предусмотрено 2 уровня).
9. С помощью кнопки  на панели управления или пульте ДУ выберите комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия воздушно-компрессионного массажа (предусмотрено 3 уровня) или отключите данную функцию.
10. С помощью кнопки  на панели управления или пульте ДУ выберите комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия массажных роликов (предусмотрено 3 уровня).

Примечание! Данная функция активна только в ручном режиме!

11. Массаж закончится автоматически через 15 минут после начала работы. Если вы хотите прервать работу массажера раньше, нажмите кнопку  на панели управления либо на пульте ДУ. Устройство перейдет в режим ожидания. Затем вы можете выбрать другой режим массажа или прекратить работу массажера.
12. По завершении массажа отключите прибор от сети

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не пытайтесь вставить на массажер.
- Не используйте массажер более 15 минут. Полезное действие массажа составляет 15 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.



Внимание!

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

Уход и хранение

Правильное обслуживание поможет поддерживать массажер для ног в хорошем техническом состоянии и продлить его срок службы. Неправильное же техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы массажера.

- Регулярно удаляйте пыль влажной тряпкой.
- Перед чисткой выключите устройство.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части устройства.



Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



Внимание! Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.

Примечание: Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменить комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменения веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5\text{--}10\%$.

Утилизация

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
	Устройство включено неправильно	Проверьте правильность подключения адаптера
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 15 мин	Это нормально, устройство исправно работает
	Сработала защита от перегрева	Дайте массажеру остыть и включите его повторно
Массаж вызывает болезненные ощущения	Активирован высокий уровень интенсивности воздействия	Уменьшите уровень интенсивности воздействия с помощью кнопок на панели управления или пульта ДУ

Технические характеристики

Модель: MF-30


Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 90 Вт

Размер: 40,5 * 42,5 * 43 см

Вес: 6,6 кг

Материал корпуса: пластик, полиуретан

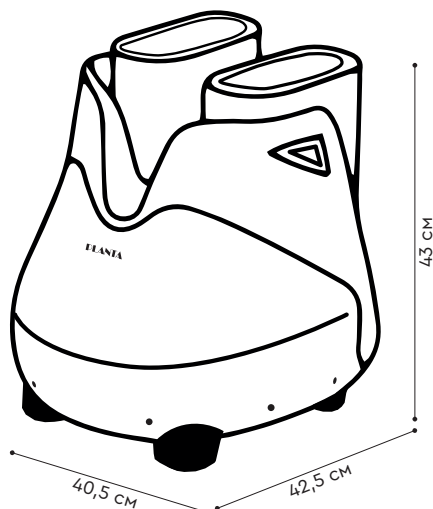

Гарантийный талон

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата производства: см. на упаковке Изготовитель: Юнкан Кванг индастри энд трейд Ко., Лтд Адрес: 599 Дорога Донгду, зона экономического развития, город Юнкан, провинция Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован Сделано в Китае  класс защиты I	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	--