



Инструкция по применению Подушка ортопедическая под голову по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

Наименование медицинского изделия:

Подушка ортопедическая под голову
по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 (далее по тексту «подушка»
или «изделие»).

Модель: Т.109 (размер: XXS)

Модель: Т.110 (размер: XXS)

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в лечебно-профилактических учреждени-
ях и для пользования на дому.

Назначение медицинского изделия:

Подушки ортопедические предназначены: для физиологически
правильного положения шейного, поясничного отделов позвоночника,
для разгрузки позвоночника, расслабления мышц спины и шеи,
для снятия усталости мышц, расслабления мышц, для правильного
развития позвоночника и головы у детей. Подушки могут использовать
дети.

Особенности (Т.109):

- конструкция подушки разработана для правильного развития
шейного отдела позвоночника и головы ребенка;
- бережно поддерживает голову и шею ребенка, снижает нагрузку
на шейный отдел позвоночника во время сна;
- основа (наполнитель) — вязкоэластичный пенополиуретан
с «эффектом памяти» — мягко и равномерно распределяет давление
тела на подушку;
- несъемный чехол из велюра — мягкий, приятный на ощупь материал;
- в комплекте две съемные наволочки из хлопка.

Особенности (Т.110):

- конструкция подушки разработана для правильного развития
шейного отдела позвоночника у маленьких детей во время сна,
учитывая их анатомо-физиологические особенности;
- бережно поддерживает голову и шею ребенка, снижает нагрузку
на шейный отдел позвоночника, нормализует мышечный тонус
и кровообращение головы и шеи
- основа (наполнитель) — фибер — сохраняет и восстанавливает
форму, не впитывает запахи и влагу, обладает оптимальным
теплообменом, воздухопроницаема, легко стирается, быстро
сохнет, сохраняя свои первоначальные свойства и форму;
- несъемный чехол из хлопка

Показания к применению:

- профилактика приобретенной кривошеи;
- предотвращение деформаций затылочной области на ранних
стадиях рахита;
- здоровым детям для правильного развития шейного отдела позвоноч-
ника.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Не выявлены.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

Применять изделие по назначению и под контролем врача.
При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь
к Вашему лечащему врачу.

Функции:

- поддержка головы и шеи ребенка в физиологически правильном
положении (Т.109, Т.110);
- снижение нагрузки на шейный отдел позвоночника (Т.109, Т.110);
- развитие симметричной формы головы у детей (Т.109, Т.110);
- нормализация мышечного тонуса и кровообращения головы и шеи;

Условия и способ применения:

Расположить подушку узким валиком под шею ребенка.

Комплектность:

В комплект поставки входит: подушка — 1 шт.; инструкция
по применению — 1 шт.; индивидуальная упаковка — 1 шт.;
наволочка (при необходимости) — 1 шт.

Транспортирование:

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого
транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов,
действующими на данном виде транспорта. При транспортировании
изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений,
механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспор-
тирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре
от -40 °С и до +40 °С и относительной влажности воздуха 15–80 %.

Хранение:

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях,
защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных
воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осущест-
вляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо
в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1
по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже +0 °С и не выше +35 °С
при относительной влажности воздуха 15–70 %.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопитель-
ных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб,

радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.
Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра.
Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Уход за изделием (Т.109):

- основа: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 °С мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.

Уход за изделием (Т.110):

- раз в неделю проветривать подушку на свежем воздухе;
- стирать подушку по мере загрязнения;
- разрешена ручная стирка в теплой воде до 40 °С мягкими моющими средствами;
- не использовать растворители, отбеливатели и химический метод чистки;
- запрещено выжимать и сушить в стиральной машине;
- сушить подушку естественным образом на ровной поверхности в хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов;
- не гладить;
- избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Срок годности и гарантийные обязательства изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения изделий — 5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Состав:

Модель Т.109: основа — вязкоэластичный пенополиуретан, несъемный чехол: хлопок — 70,7 %, полиэстер — 29,3 %, съемные наволочки: хлопок — 100 %;

Модель Т.110: наволочка: хлопок — 100 %, наполнитель: файбер;

Размер подушки:

Модель Т.109: XXS

Модель Т.110: XXS

Габаритные размеры подушки:

Модель Т.109: 25х24х3,5 см.

Модель Т.110: 31х24х6 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.

Подушки ортопедические и противопролежневые по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017, в вариантах исполнения:
Подушка ортопедическая под голову (вид 185030), варианты исполнения:
- Модель Т.109, размер: XXS; в составе: инструкция по применению — 1 шт., наволочка — 2 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт.
- Модель Т.110, размер: XXS; в составе: инструкция по применению — 1 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт.

РУ № РЗН 2018/7779 от 01.11.2018 г.

Производитель/уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «МЕДИАНА»
Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, пом. 5Н-3
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

Место производства:

(М) ООО «МЕДИАНА»,
Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. АП, корп. 7, пом. 5Н-3.

(Т) ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. Р, корп. 14, пом. 10Н-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Лит. В, корп. 3, пом. 1Н-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.



Дата изготовления
(номер серии)