



Инструкция по применению Подушка ортопедическая под голову по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

Наименование медицинского изделия:

Подушка ортопедическая под голову по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 (далее по тексту «подушка» или «изделие»).

Модель: Т.504М (размер: М+)

Модель: Т.511М (размер: М)

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в лечебно-профилактических учреждениях и для пользования на дому.

Назначение медицинского изделия:

Подушки ортопедические предназначены: для физиологически правильного положения шейного, поясничного отделов позвоночника, для разгрузки позвоночника, расслабления мышц спины и шеи, для снятия усталости мышц, расслабления мышц, а также для профилактики остеохондроза и сколиоза за счет фиксации шейного отдела позвоночника в правильном положении.

Особенности (Т.504М):

- анатомическая форма валиков для обеспечения физиологически правильного положения головы и шеи;
- два валика высотой 9 и 12 см;
- основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти», который принимает индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины;
- воздухопроницаемый материал основы обладает выраженными терморегулирующими свойствами;
- ребристая поверхность обеспечивает улучшенный воздухообмен и легкий массаж мышц шеи;
- несъемный внутренний чехол выполнен из хлопка, что придает дополнительную мягкость изделию;
- съемная наволочка на молнии **с пропиткой алоэ вера**.

Особенности (Т.511М):

- анатомическая форма валиков для обеспечения физиологически правильного положения головы и шеи;
- два валика высотой 9 и 11 см;
- основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти», который принимает индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины;
- воздухопроницаемый материал основы обладает выраженными терморегулирующими свойствами;
- гладкая поверхность обеспечивает максимальный комфорт во время сна и отдыха;
- несъемный внутренний чехол выполнен из хлопка, что придает дополнительную мягкость изделию;
- съемная наволочка на молнии **с пропиткой алоэ вера**.

Показания к применению:

- головные боли, головокружения, повышенная утомляемость, боли в шейном отделе позвоночника;
- миозиты мышц шеи;
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилез шейного отдела позвоночника;
- нестабильность шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после травм шейного отдела позвоночника;
- рекомендована для полноценного восстановления организма во время сна.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Не выявлены.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Функции:

- обеспечение физиологически правильного положения головы и шеи во время сна;
- разгрузка мышц и связочного аппарата шеи и плечевого пояса;
- нормализация мышечного тонуса, устранение усталости;
- улучшение кровоснабжения головы и шеи;
- обеспечение свободного дыхания во время сна.

Условия и способ применения:

Расположить подушку валиком под шейный отдел.

Комплектность:

В комплект поставки входит: подушка — 1 шт.; инструкция по применению — 1 шт.; индивидуальная упаковка — 1 шт.; наволочка (при необходимости) — 1 шт.

Транспортирование:

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150,

но при температуре от -40 °С и до +40 °С и относительной влажности воздуха 15–80 %.

Хранение:

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже +0 °С и не выше +35 °С и относительной влажности воздуха 15–70 %.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Уход за изделием:

- основа: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 градусов по Цельсию мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Срок годности и гарантийные обязательства изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий — 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Состав:

Модель Т.504М: основа — вязкоэластичный пенополиуретан, чехол: хлопок — 100 %, съемная наволочка с пропиткой алоэ вера: 74,6 %, вискоза — 25,4 %;

Модель Т.511М: основа — вязкоэластичный пенополиуретан, чехол: хлопок — 100 %, съемная наволочка с пропиткой алоэ вера: полиэстер — 74,6 %, вискоза — 25,4 %.

Размер подушки:

Модель Т.504М: М+

Модель Т.511М: М

Габаритные размеры подушки:

Модель Т.504М: 47х36х12/9 см.

Модель Т.511М: 49х32х11/9 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Подушки ортопедические и противопролежневые по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017, в вариантах исполнения: Подушка ортопедическая под голову (вид 185030), варианты исполнения: - Модель Т.504М, размеры: XS, М+; в составе: инструкция по применению — 1 шт., наволочка — 1 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт. - Модель Т.511М, размер: М; в составе: инструкция по применению — 1 шт., наволочка — 1 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт. РУ № РЗН 2018/7779 от 01.11.2018 г.

Производитель/уполномоченная организация по принятию претензий:
ООО «МЕДИАНА»
Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, пом. 5Н-3
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru



Место производства:
(М) ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. АП, корп.7, пом. 5Н-3.
(Т) ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. Р, корп. 14, пом. 10Н-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Лит. В, корп. 3, пом. 1 Н-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Дата изготовления
(номер партии)