

# Trives



MED

T.125

## ПОДУШКА

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
ПОД ГОЛОВУ



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКИ





ПРАВИЛЬНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ  
И ШЕИ ВО ВРЕМЯ СНА



ОСНОВА С «ЭФФЕКТОМ  
ПАМЯТИ»



ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА

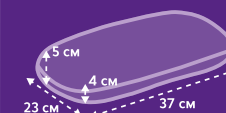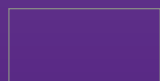



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД ГОЛОВУ ПО ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

## Наименование медицинского изделия:

Подушка ортопедическая под голову по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 (далее по тексту «подушка» или «изделие»).

## Модель: Т.125

## Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в лечебно-профилактических учреждениях и для пользования на дому.

## Назначение медицинского изделия:

Подушки ортопедические предназначены: для физиологически правильного положения шейного, поясничного отделов позвоночника, для разгрузки позвоночника, расслабления мышц спины и шеи, для снятия усталости мышц, расслабления мышц, для правильного развития позвоночника и головы у детей. Подушки могут использовать дети.

## Особенности:

- рекомендуется для использования детям в возрасте от 1 года до 2,5 лет
- конструкция разработана для правильного развития шейного отдела позвоночника и головы, учитывая анатомо-физиологические особенности
- два валика высотой 5 и 4 см
- основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти», который принимает индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины
- несъемный внутренний чехол из хлопка
- съемная наволочка

## Показания:

- профилактика приобретенной кривошеи
- предотвращение деформаций затылочной области на ранних стадиях рахита
- профилактика развития асимметрии головы
- здоровым детям для правильного развития шейного отдела позвоночника

## Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний не выявлено.

## Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Не выявлены.

## Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

## Функции:

- бережная поддержка головы и шеи ребенка
- снижение нагрузки на шейный отдел позвоночника
- нормализация мышечного тонуса и кровообращения головы и шеи

## Условия и способ применения:

Расположить подушку валиком под шейный отдел.

## Комплектность:

В комплект поставки входит: подушка – 1 шт.; инструкция по применению – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1 шт.; наволочка (при необходимости) – 1 шт.

## Транспортирование:

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от -40 °C и до +40 °C и относительной влажности воздуха 15-80 %.

## Хранение:

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже +0 °C и не выше +35 °C и относительной влажности воздуха 15-70 %.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

## Уход за изделием:

- основа: сухая чистка
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 градусов по Цельсию мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить
- не подвергать воздействию прямого солнечного света
- держать вдали от нагревательных приборов

- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы

## Срок годности и гарантийные обязательства изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи потребителю.

## Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

## Состав:

- основа: вязкоэластичный пенополиуретан
- чехол: хлопок – 100 %
- съемная наволочка: хлопок – 70,7 %, полиэстер – 29,3 %

## Размер подушки: XS

Габаритные размеры подушки: 37х23х5/4 см

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.



Дата изготовления  
Штамп ОТК

Подушки ортопедические и противопролежневые по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017, в вариантах исполнения: Подушка ортопедическая под голову (вид 185030), варианты исполнения: Модель Т.125, размер: XS; в составе: инструкция по применению – 1 шт., наволочка – 1 шт., индивидуальная упаковка – 1 шт. РУ № РЗН 2018/7779 от 01.11.2018 г.

## Производитель/уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «МЕДИАНА»

Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, пом. 5Н-3

Тел./факс: (812) 329-72-97

e-mail: info@trives-spb.ru

www.trives-spb.ru

## Место производства:

(М) ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, корп. 7, пом. 5Н-3.

(Т) ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. Р, корп. 14, пом. 10Н-4, (6-24), лит. В, корп. 3, пом. 1Н-(6-22).

Дату изготовления (номер партии) и буквенный код места производства см. на упаковке.