

Trives

MED

T.429

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ НА СИДЕНЬЕ



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ



СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ
И БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
НА ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА



СПЕЦИАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ В ФОРМЕ
КОЛЬЦА



ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КРЕСТЦА,
КОПЧИКА И ТАЗОВОГО
КОЛЬЦА





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ НА СИДЕНЬЕ ПО ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

Наименование медицинского изделия:

Подушка ортопедическая на сиденье по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 (далее по тексту «подушка» или «изделие»).

Модель: Т.429

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в лечебно-профилактических учреждениях и для пользования на дому.

Назначение медицинского изделия:

Подушки ортопедические предназначены: для разгрузки позвоночника, для снятия усталости мышц, расслабления мышц, разгрузки тазовой области при сидении, до–после и при беременности, перенесенных операций и при заболеваниях тазовой области, а так же для равномерного распределения нагрузки в положении сидя, улучшения циркуляции крови и нормализации мышечного тонуса в области таза, для комфортной работы в положении сидя.

Особенности:

- специальная конструкция в форме кольца позволяет уменьшить болевые ощущения и создает максимальный комфорт в положении сидя;
- основа из упруго-эластичного пенополиуретана — современный материал, длительно сохраняющий форму;
- универсальная форма подушки позволяет использовать ее на любом виде сидений;
- съемная наволочка.

Показания:

- реабилитация после травм таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности;
- послеродовой период;
- в комплексном лечении заболеваний прямой кишки и органов малого таза;
- профилактика пролежней у людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний не выявлено.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Не выявлены.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Функции:

- эффективное снижение нагрузки с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности в положении сидя;
- улучшение кровообращения и ускорение обменных процессов в тазовой области за счет специальной конструкции и структуры материала.

Условия и способ применения:

Положить подушку на стул или кресло.

Комплектность:

В комплект поставки входит: подушка — 1 шт.; инструкция по применению — 1 шт.; индивидуальная упаковка — 1 шт.; наволочка (при необходимости) — 1 шт.

Транспортирование:

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от -40 °С и до +40 °С и относительной влажности воздуха 15–80 %.

Хранение:

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже +0 °С и не выше +35 °С и относительной влажности воздуха 15–70%.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий

должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Уход за изделием:

- основа: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 градусов по Цельсию мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.

Срок годности и гарантийные обязательства изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий — 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Состав:

- основа: пенополиуретан;
- съемная наволочка: полиэстер — 100%.

Размер подушки: М.

Габаритные размеры подушки: 48х38х8 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.



Подушки ортопедические и противопролежневые по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017, в вариантах исполнения: Подушка ортопедическая на сиденье (вид 185030), варианты исполнения: Модель Т.429, размер: М; в составе: инструкция по применению — 1 шт., наволочка — 1 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт. РУ № РЗН 2018/7779 от 01.11.2018 г.

Производитель/уполномоченная организация по принятию претензий:


ООО «МЕДИАНА»
Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, пом. 5Н-3
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

Место производства:

(М) ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. АП, Корп. 7, пом. 5Н-3.

(Т) ООО «ТД «ТРИВЕС СПб», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. Р, Корп. 14, Пом. 10Н-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Лит. В, Корп. 3, Пом. 1Н-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Дату изготовления (номер партии) и буквенный код места производства см. на упаковке

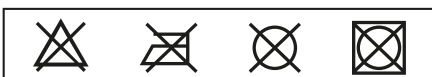

Дата изготовления
Штамп ОТК