



Инструкция по применению Подушка ортопедическая под голову по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

Наименование медицинского изделия:

Подушка ортопедическая под голову по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 (далее по тексту «подушка» или «изделие»).

Модель: Т.504М (размер: XS)

Модель: Т.550 (размер: XS-S)

Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в лечебно-профилактических учреждениях и для пользования на дому.

Назначение медицинского изделия:

Подушки ортопедические предназначены: для физиологически правильного положения шейного, поясничного отделов позвоночника, для разгрузки позвоночника, расслабления мышц спины и шеи, для снятия усталости мышц, расслабления мышц, а также для профилактики остеохондроза и сколиоза за счет фиксации шейного отдела позвоночника в правильном положении, для правильного развития позвоночника и головы у детей.

Особенности (Т.504М):

- рекомендуется для использования детям в возрасте от 3 до 8 лет;
- анатомическая форма подушки, поддерживающая изгиб шейного отдела позвоночника;
- два валика высотой 8 и 6 см;
- основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти», который принимает индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины;
- воздухопроницаемый материал основы обладает выраженными терморегулирующими свойствами;
- ребристая поверхность обеспечивает улучшенный воздухообмен и легкий массаж мышц шеи;
- несъемный внутренний чехол выполнен из хлопка, что придает дополнительную мягкость изделию;
- съемная наволочка на молнии **с пропиткой алоэ вера**.

Особенности (Т.550):

- рекомендуется для использования детям от 5 лет до подросткового возраста;
- универсальная конструкция подушки с регулируемой высотой подшеиных валиков;
- два валика высотой 5 и 7 см (без вставок);
- комплектуется двумя съемными элементами толщиной по 1 см для регулировки высоты;
- основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти», который принимает индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины;
- воздухопроницаемый материал основы обладает выраженными терморегулирующими свойствами;
- гладкая поверхность для максимального комфорта во время сна и отдыха;
- несъемный внутренний чехол из хлопка;
- съемная наволочка на молнии **с пропиткой алоэ вера**.

Показания к применению:

- головные боли, головокружения, повышенная утомляемость, боли в шейном отделе позвоночника;
- миозит мышц шеи (Т.504М);
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилез шейного отдела позвоночника;
- нестабильность шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после травм шейного отдела позвоночника;
- рекомендована для полноценного отдыха во время сна;
- профилактика беспокойного сна и повышенной возбудимости у детей и подростков (Т.550).

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Не выявлены.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Функции:

- обеспечение физиологически правильного положения головы и шеи во время сна;
- разгрузка мышц и связочного аппарата шеи и плечевого пояса;
- правильное формирование и развитие шейного отдела позвоночника (Т.550);
- способствует формированию правильной осанки (Т.550);
- профилактика утомляемости и головных болей (Т.550);
- нормализация мышечного тонуса, устранение усталости (Т.504М);
- улучшение кровоснабжения головы и шеи;
- обеспечение свободного дыхания во время сна (Т.504М).

Условия и способ применения:

Расположить подушку валиком под шейный отдел.

Комплектность:

В комплект поставки входит: подушка – 1 шт.; инструкция по применению – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1 шт.; наволочка (при необходимости) – 1 шт.

Транспортирование:

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспорт-

ного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от -40 °С и до +40 °С и относительной влажности воздуха 15-80 %.

Хранение:

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже +0 °С и не выше +35 °С и относительной влажности воздуха 15-70 %.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

Уход за изделием:

- основа: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 градусов по Цельсию мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Срок годности и гарантийные обязательства изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Состав:

Модель Т.504М: основа – вязкоэластичный пенополиуретан, чехол: хлопок – 100 %, съемная наволочка с пропиткой алоэ вера: полиэстер – 74,6 %, вискоза – 25,4 %;

Модель Т.550: основа – вязкоэластичный пенополиуретан, чехол: хлопок – 100 %, съемная наволочка с пропиткой алоэ вера: полиэстер – 74,6 %, вискоза – 25,4 %.

Размер подушки:

Модель Т.504М: XS

Модель Т.550: XS-S

Габаритные размеры подушки:

Модель Т.504М: 40x25x8/6 см.

Модель Т.550: 41x29x7/5 см (максимальная высота валиков 9 и 7 см).

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.

Подушки ортопедические и противопролежневые

по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017,

в вариантах исполнения:

Подушка ортопедическая под голову (вид 185030),

варианты исполнения:

- Модель Т.504М, размеры: XS, М+; в составе:

инструкция по применению – 1 шт., наволочка – 1 шт.,

индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Модель Т.550, размер: XS-S; в составе:

инструкция по применению – 1 шт., наволочка – 1 шт.,

индивидуальная упаковка – 1 шт.

РУ № РЗН 2018/7779 от 01.11.2018 г.

Производитель/уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «МЕДИАНА»

Россия, 192102, Санкт-Петербург,

ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, пом. 5Н-3

Тел./факс: (812) 329-72-97

e-mail: info@trives-spb.ru

www.trives-spb.ru

Место производства:

(М) ООО «МЕДИАНА»,
Россия, 192102, Санкт-Петербург,
ул. Самойловой, д. 5,
лит. АП, корп. 7, пом. 5Н-3.



Дата выпуска
Штамп ОТК

