


Габариты подушки:



Удобный сон в любом положении

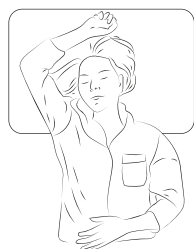

на спине



на животе



на боку

Приспособления ортопедические специальной формы для расслабления мышц и разгрузки позвоночника ТОП-«ТРИВЕС» по ТУ 9396-002-85557773-2008 в следующих исполнениях:
- Подушка ортопедическая под голову ТОП-«ТРИВЕС» (вид 181450);
РУ № ФСР 2008/03750 от 30.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель — уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:



Дата выпуска
Штамп ОТК

Дата продажи
Штамп торг.
организации

Trives

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД ГОЛОВУ

ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА

MED



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ



ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ
И ШЕИ ВО ВРЕМЯ СНА



ОСНОВА С «ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ»

ТОП-160

Подушка ортопедическая под голову ТОП – «ТРИВЕС»

Модель: ТОП-160

Особенности:

- классическая форма подушки способствует физиологически правильному положению головы и шеи во время сна и отдыха;
- основа из материала Soft Touch «эффект памяти», который обладает повышенной мягкостью и舒适ностью и подстраивается под индивидуальную форму головы и шеи, реагируя на тепло тела человека;
- съёмная наволочка для лёгкого ухода.

Функции:

- обеспечение физиологически правильного положения головы и шеи во время сна;
- разгрузка мышц и связочного аппарата шеи и плечевого пояса;
- нормализация мышечного тонуса, устранение усталости;
- улучшение кровоснабжения головы и шеи;
- обеспечение свободного дыхания во время сна.

Показания к применению:

- головные боли, головокружения, повышенная утомляемость, боли в шейном отделе позвоночника;
- миозит мышц шеи;
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилез шейного отдела позвоночника;
- рекомендована для полноценного восстановления организма во время сна и отдыха.

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Способ применения: расположить подушку под шейный отдел позвоночника.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Уход за изделием:

- основа: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съёмная наволочка: стирать в теплой воде до 40 градусов по Цельсию мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.


Состав:

- основа: вязкоэластичный пенополиуретан;
- съёмная наволочка: полиэстер — 100 %;

Габариты подушки: 60х40х12 см.


Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.

Ортопедические подушки в ассортименте

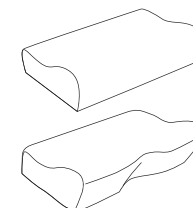

Под голову

- разгружают шейный отдел позвоночника
- обеспечивают здоровый и крепкий сон

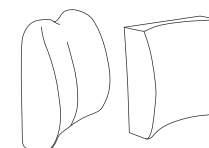


Под спину

- снижают избыточную нагрузку на поясницу
- обеспечивают правильное положение позвоночника
- нормализуют тонус мышц спины



Под ноги

- снимают отечность и усталость ног
- уменьшают нагрузку на нижние конечности

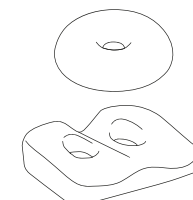

На сиденье

- эффективно снимают нагрузку с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности



Для путешествий

- обеспечивают физиологически правильное положение головы и шейного отдела позвоночника во время длительных поездок (в самолете, поезде, автобусе или автомобиле)

Для взрослых



Для подростков



Для младенцев

