

**Удовольствие
в заботе!**



**Массажер для ног
КТ-2973**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Массажер для ног КТ-2973 выполнит массаж ваших ног и избавит их от усталости. Устройство выполняет 2 вида массажа: вибрационный и вибрационно-роликовый. Управление осуществляется с помощью кнопок на панели управления или с помощью пульта дистанционного управления (ДУ).

Прибор массирует стопы благодаря колебаниям различной интенсивности. У устройства есть 3 автоматических программы, которые отличаются интенсивностью массажа. Также у массажера есть ручная настройка. При выборе ручной настройки вы можете самостоятельно настроить интенсивность от 1 до 15, выбрать длительность массажа от 1 до 15 минут, а также включить или выключить работу роликов. Роликовый массаж в сочетании с вибрационным позволяет размять, а также расслабить мышцы более эффективно, чем вибрационный массаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая их при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж стоп обладает следующими положительными эффектами: улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-2973 не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Массажер для ног выполнен в форме платформы с двумя подкладками для ног. Массаж следует делать сидя, так как массажер выдерживает нагрузку до 30 кг.


Прорезиненные ножки массажера не дают ему скользить по полу. На дне устройства также есть ножки для изменения угла наклона массажера. Прибор оснащен ручками для переноски. На массажере есть место для хранения пульта ДУ.

Комплектация


1. Массажер с двумя подкладками для ног — 1 шт.
2. Пульт ДУ с крышкой отсека для батареек и двумя батарейками типоразмера AAA × 1,5 В — 1 шт.
3. Блок питания со шнуром — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

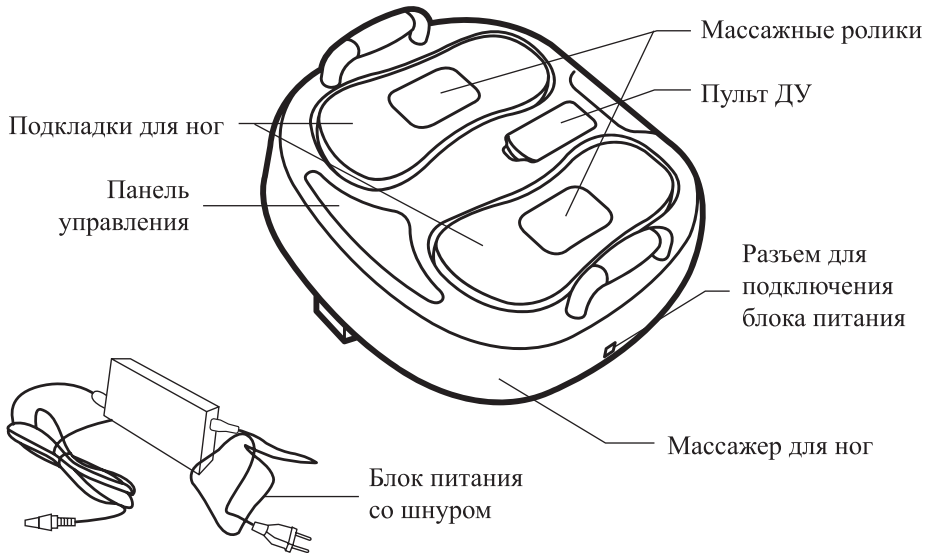

Панель управления

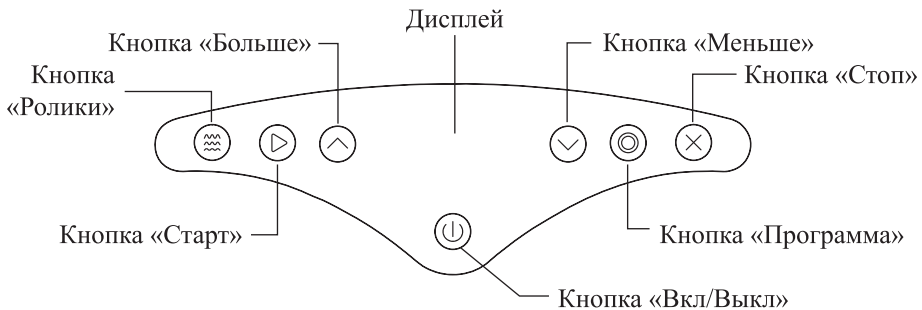

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. При включении прибор переходит в режим ожидания и на дисплее отображается надпись «НА» (ручная настройка).

Кнопка «Программа» циклически переключает программы. По умолчанию длительность массажа во всех программах составляет 15 минут, интенсивность массажа установлена следующим образом:

- НА — ручная настройка, по умолчанию установлена интенсивность 1;
- P1 — первая программа, интенсивность автоматически меняется от 1 до 5;
- P2 — вторая программа, интенсивность автоматически меняется от 6 до 10;

- Р3 — третья программа, интенсивность автоматически меняется от 11 до 15.

Примечание. Если не отключить работу в автоматической программе вручную, то через несколько секунд после окончания массажа прибор снова начнет массаж согласно заданным настройкам.

Кнопками «Больше» и «Меньше» в режиме ожидания настраивается длительность массажа от 1 до 15 минут при выборе ручной настройки или автоматической программы, а во время массажа — интенсивность массажа от 1 до 15 при выборе ручной настройки.

Примечание. Интенсивность массажа нельзя изменить для автоматических программ.


Чтобы начать массаж, нажмите на **кнопку «Старт»**. Для прекращения массажа нажмите на **кнопку «Стоп»**. После того, как вы остановили работу массажера при выборе ручной настройки, настройки интенсивности и длительности сбрасываются.

Чтобы включить или выключить работу роликов, во время массажа нажмите на **кнопку «Ролики»**.

Примечание. Работу роликов нельзя выключить в режиме ожидания, а также при работе автоматических программ.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковыми сигналами.

Пульт ДУ

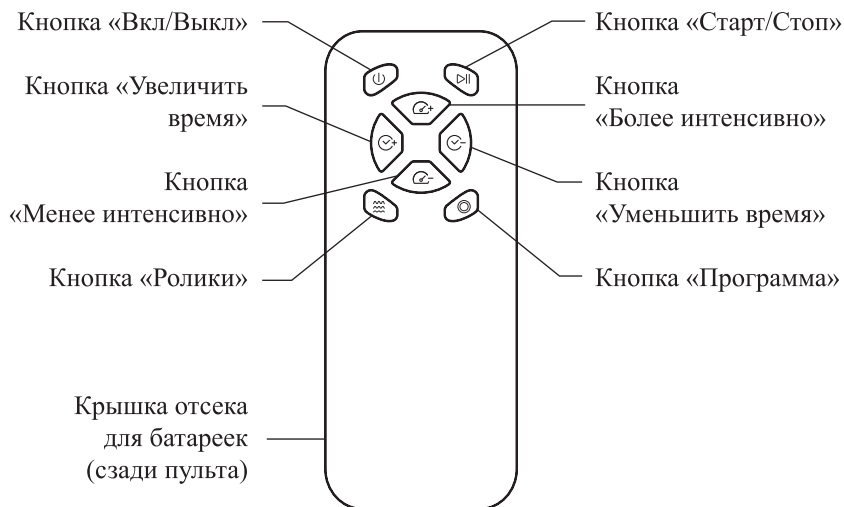

Вы можете управлять работой прибора с помощью пульта ДУ, направляя его на корпус массажера. Пульт ДУ питается от 2 батареек типоразмера AAA × 1,5 В.

Кнопка «Вкл/Выкл» на пульте ДУ включает и выключает массажер. При включении прибор переходит в режим ожидания и на дисплее отображается надпись «НА» (ручная настройка).

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает работу прибора. Чтобы начать массаж, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Для прекращения массажа нажмите на кнопку «Старт/Стоп» еще раз. После того, как вы остановили работу массажера при ручной настройке, настройки интенсивности и длительности сбрасываются.

Чтобы включить или выключить работу роликов, во время массажа нажмите на кнопку **«Ролики»**.

Примечание. Работу роликов нельзя выключить в режиме ожидания, а также при работе автоматических программ.

Кнопки «Увеличить время» и «Уменьшить время» позволяют в режиме ожидания изменить длительность массажа от 1 до 15 минут с шагом 1 минута.

Кнопки «Более интенсивно» и «Менее интенсивно» позволяют изменить интенсивность массажа от 1 до 15 в ручной программе.

Примечание. Интенсивность массажа нельзя изменить, если выбрана одна из автоматических программ.

Кнопка «Программа» циклически переключает программы.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Потяните подкладки в сторону от прибора, чтобы снять их. Протрите корпус и подкладки для ног влажной, затем сухой мягкой тканью. Убедитесь, что подкладки для ног сухие, и установите их так, чтобы выступы на подкладках совпали с пазами на корпусе прибора.

Расположите массажер на полу так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте массажер на ковер с длинным ворсом.

Вы можете изменить уровень наклона массажера. Выдвиньте две ножки на дне прибора, потянув их в сторону от прибора. Для этого может потребоваться приложить некоторые усилия.

Подсоедините шнур к блоку питания. Подключите шнур блока питания к разъему для блока питания, а затем — к сети. Прибор подаст звуковой сигнал. Индикатор на блоке питания будет гореть непрерывно.

Установка батареек в пульт ДУ

1. Снимите крышку отсека для батареек, слегка надавив на нее и потянув вниз.
2. Вставьте 2 батарейки типоразмера AAA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках.
3. Чтобы закрыть отсек для батареек, расположите крышку так, чтобы выступы на пульте оказались сверху выступов на крышке, задвиньте крышку до упора.

Использование

1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Затем поставьте ноги на подкладки для ног. Массаж можно делать босиком или в носках, не проводите массаж в обуви. Следует расположить ноги так, чтобы продольный свод стопы находился над массажными роликами.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставайте на массажер. Прибор выдерживает нагрузку до 30 кг.

2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится надпись «НА» (ручная настройка). По умолчанию установлена 1 степень интенсивности и длительность массажа 15 минут.
3. Для выбора программы нажимайте на кнопку «Программа» на панели управления или пульте ДУ.
4. Для настройки интенсивности массажа в режиме ожидания нажимайте на кнопку «Более интенсивно» или «Менее интенсивно» на пульте ДУ или на кнопку «Больше» или «Меньше» на панели управления.

Примечание. Интенсивность массажа нельзя изменить для автоматических программ.

5. Для настройки длительности массажа нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше» на панели управления или кнопку «Увеличить время» или «Уменьшить время» пульта ДУ. Вы можете изменить продолжительность массажа от 1 до 15 минут с шагом 1 минута.
6. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» на пульте ДУ или на кнопку «Старт» на панели управления. Устройство подаст звуковой сигнал и начнет выполнять массаж. На дисплее при выборе ручной настройки будет попеременно отображаться интенсивность и оставшееся время массажа, а при выборе автоматической программы — только интенсивность.
7. Во время массажа при выборе ручной настройки вы можете включить или выключить работу роликов. Для этого нажмите на кнопку «Ролики».

Примечание. Работу роликов нельзя выключить при работе автоматических программ.

8. По окончании заданного времени массаж прекратится, на дисплее отобразится «00». Не рекомендуется выполнять массаж более 15 минут подряд.

Примечание. Если не отключить работу автоматической программы вручную, то через несколько секунд после окончания массажа прибор снова начнет массаж согласно заданным настройкам. Чтобы прекратить массаж, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» на пульте ДУ или на кнопку «Стоп» на панели управления. Не используйте массажер более 15 минут подряд во избежание выхода из строя прибора. Перед повторным включением должно пройти не менее 15–30 минут.

9. Чтобы прекратить массаж раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» на пульте ДУ или на кнопку «Стоп» на панели управления.

10. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте ДУ или панели управления. Массажер выключится, дисплей погаснет.

Меры предосторожности по применению

1. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
2. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (наличие ран, порезов, ожогов и т.д.);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление.
4. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль в ногах, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Протирайте корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора, на массажные ролики, на шнур питания или в область органов управления, а также на пульт ДУ.

Регулярно очищайте подкладки для ног. В случае сильного загрязнения снимите подкладки, аккуратно потянув их в сторону от прибора, и промойте теплой водой. Дайте им полностью просохнуть, а затем присоедините к прибору так, чтобы выступы на подкладках попали в пазы на корпусе прибора.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор на блоке питания не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур блока питания не плотно вставлен в разъем массажера или в розетку, либо шнур не плотно вставлен в блок питания	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем массажера, затем подключите блок питания к сети. Проверьте, чтобы шнур питания был плотно вставлен в разъем на блоке питания

Пульт ДУ не работает

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены в пульт ДУ	Установите батарейки в пульт ДУ, соблюдая полярность
Неправильно установлены батарейки в пульт ДУ	Переустановите батарейки в пульт ДУ, соблюдая полярность, указанную на батарейках и на крышке отсека для батареек
Батарейки в пульте ДУ сели	Замените батарейки в пульте ДУ на новые
Пульт ДУ направлен не на прибор	Направьте пульт ДУ на прибор

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите более низкую интенсивность массажа, вы также можете попробовать сменить программу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: $\sim 100\text{--}240\text{ В}$, 50/60 Гц, 1,5 А
 - выход: $\text{---}24\text{ В}$, 2 А
- Мощность: 35 Вт
- Тип массажера: вибрационный + роликовый
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Количество автоматических программ: 3
- Степени интенсивности: 15
- Таймер: от 1 до 15 мин с шагом 1 мин
- Размер ноги: 35–47
- Длина шнура блока питания: 1,1 + 0,8 м
- Размер устройства: $460 \times 460 \times 150\text{ мм}$
- Размер упаковки: $510 \times 510 \times 200\text{ мм}$
- Вес нетто: 5,3 кг
- Вес брутто: 7,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Чжэцзян Майбу Интелиджэнт Индастри Ко., Лтд. №5 Фужун Роуд, Байхуа Шань Индастри Дистрикт, Икономик Дивелэпмэнт Эриа, Уи, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей в массажер, на шнур блока питания или разъем шнура, а также в область органов управления и на пульт ДУ не является гарантийным случаем. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несоответствующего использования.

Выход из строя устройства вследствие превышения максимального времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что пара-

метры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания или шнура блока питания его следует заменить специальным шнуром или блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87