


**Получай
удовольствие!**

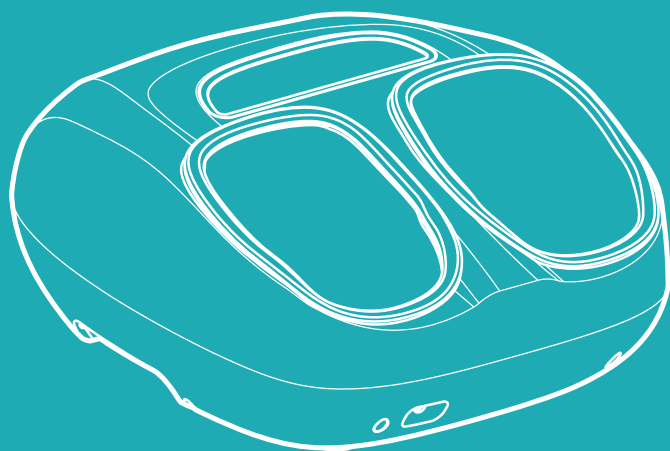

**Массажер для ног
КТ-5902**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5902 поможет снять усталость, уменьшить отеки и расслабить мышцы стоп с помощью роликового массажа. Благодаря инфракрасному нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Интенсивность вибрационного массажа настраивается: вы можете выбрать низкую, среднюю или высокую интенсивность. Также вы можете изменить скорость движения роликов и силу давления массажа от низкой до высокой.

Массажер оснащен таймером на 10, 20 и 30 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

У устройства есть 6 автоматических программ, которые отличаются интенсивностью вибрации, силой давления, скоростью роликов и уровнем нагрева.

Такое разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая стопы при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж ног улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью.

Стильный дизайн массажера отлично впишется в любой интерьер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-5902 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер с двумя съемными чехлами для ног — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

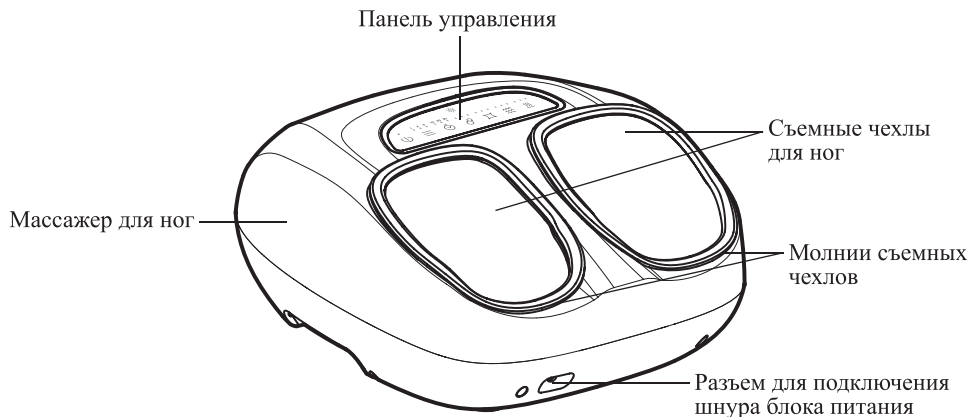

Панель управления

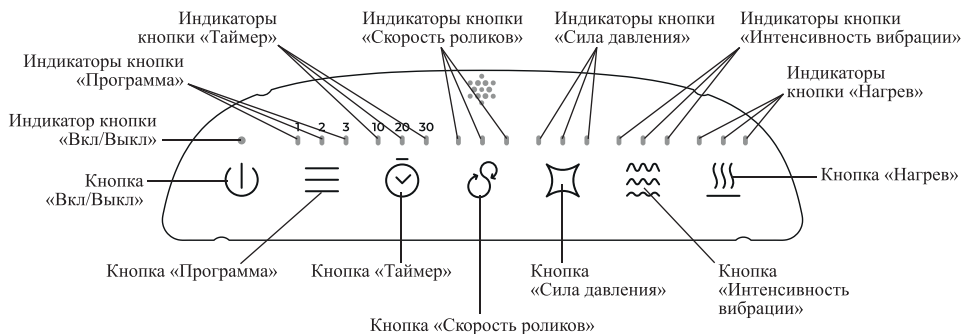

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. Устройство начнет выполнять массаж, по умолчанию включена программа «1». Горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл» и индикатор кнопки «Программа» «1». Таймер по умолчанию установлен на 20 минут. Вы можете остановить работу массажера раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Нажатие на **кнопку «Программа»** циклически переключает программы.

- 1 программа — средняя скорость роликов, средняя сила давления, низкая интенсивность вибрации, низкий уровень нагрева. Во время работы будет гореть индикатор «1».
- 2 программа — средняя скорость роликов, средняя сила давления, низкая интенсивность вибрации, низкий уровень нагрева. Во время работы будет гореть индикатор «2».
- 3 программа — средняя скорость роликов, средняя сила давления, низкая интенсивность вибрации. Нагрев отключен. Во время работы будет гореть индикатор «3».

- 4 программа — средняя скорость роликов, средняя сила давления, низкий уровень нагрева. Вибрация отключена. Во время работы будут гореть индикаторы «1» и «3».
- 5 программа — ролики отключены, средняя сила давления, низкий уровень вибрации, низкий уровень нагрева. Во время работы будут гореть индикаторы «2» и «3».
- 6 программа — средняя скорость роликов, низкая интенсивность вибрации. Давление и нагрев отключены. Во время работы будут гореть индикаторы «1», «2» и «3».

Примечание. Вы можете менять настройки всех параметров во время работы программ.

Кнопка «Таймер» циклически переключает время таймера: 10, 20 и 30 минут. По умолчанию таймер установлен на 20 минут. При выборе времени таймера соответствующий индикатор будет гореть.

Кнопка «Скорость роликов» включает, выключает и циклически переключает низкую, среднюю и высокую скорость роликов массажера. По умолчанию установлена средняя скорость. При выборе скорости соответствующий индикатор будет гореть. Когда функция отключена, ни один из индикаторов данной кнопки не горит.

Кнопка «Сила давления» включает, выключает и циклически переключает низкую, среднюю и высокую силу давления. По умолчанию установлена средняя сила. При выборе силы давления соответствующий индикатор будет гореть. Когда функция отключена, ни один из индикаторов данной кнопки не горит.

Кнопка «Интенсивность вибрации» включает, выключает и циклически переключает низкую, среднюю и высокую интенсивность вибрации. По умолчанию установлена низкая интенсивность. При выборе интенсивности вибрации соответствующий индикатор будет гореть. Когда функция отключена, ни один из индикаторов данной кнопки не горит.

Кнопка «Нагрев» включает, выключает и циклически переключает низкий, средний и высокий уровни нагрева. По умолчанию установлен низкий уровень нагрева. При выборе уровня нагрева соответствующий индикатор будет гореть. Когда функция отключена, ни один из индикаторов данной кнопки не горит.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной, затем сухой мягкой тканью.

Расположите массажер на полу так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте массажер на ковер с длинным ворсом.

Подсоедините шнур к блоку питания. Подключите шнур блока питания к разъему для блока питания.

Использование

1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Затем поставьте ноги в массажер. Следует расположить ноги так, чтобы продольный свод стопы находился над массажными роликами.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставайте на массажер.

2. Подключите массажер к сети электропитания. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет мигать.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть непрерывно. Устройство начнет выполнять массаж, по умолчанию включена программа «1». Горит индикатор кнопки «Программа» «1». Таймер по умолчанию установлен на 20 минут. Вы можете остановить работу массажера раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Для смены автоматической программы нажимайте на кнопку «Программа», пока не загорится индикатор нужной вам программы.
5. Для установки таймера нажимайте на кнопку «Таймер», пока не загорится индикатор нужного вам времени.
6. Для установки скорости роликов нажимайте на кнопку «Скорость роликов», пока не загорится индикатор нужной вам скорости роликов.
7. Для установки силы давления нажимайте на кнопку «Сила давления», пока не загорится индикатор нужной вам силы давления.
8. Для установки интенсивности вибрации нажимайте на кнопку «Интенсивность вибрации», пока не загорится индикатор нужной вам интенсивности вибрации.
9. При желании вы можете выключить нагрев, для этого нажимайте на кнопку «Нагрев», пока не загорится индикатор нужного вам уровня нагрева.
10. По прошествии установленного времени массажер автоматически отключится. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Не используйте массажер более 60 минут подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 15 минут.

Сеанс массажа для одного человека рассчитан не более чем на 30 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.

11. Отключите устройство от сети питания.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;

- обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте массажер более 60 минут. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на ногах могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети питания. Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен. Не используйте агрессивные моющие средства. Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.

Чехлы для ног регулярно стирайте вручную в теплой воде с мылом, а затем дайте им полностью высохнуть. Сухие чехлы пристегните на молнии обратно в массажер. Допускается стирать чехлы в стиральной машине на режиме ручной стирки при температуре не выше 30 °С.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер и блок питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер подключен к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Шнур блока питания не плотно вставлен в разъем для блока питания на массажере или в розетку	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем для блока питания на массажере, затем подключите блок питания к сети
Вы включали массажер более 60 минут подряд, устройство перегрелось	Подождите не менее 15 минут, попробуйте включить массажер снова

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите низкую или среднюю интенсивность массажа

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: ~12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Тип массажера: роликовый + воздушно-компрессионный
5. Количество автоматических программ: 6
6. Таймер: 10, 20 и 30 мин
7. Размер стопы: до 46
8. Длина шнура: 1,8 м
9. Размер устройства: 383 × 325 × 162 мм
10. Размер упаковки: 345 × 187 × 405 мм
11. Вес нетто: 2,6 кг
12. Вес брутто: 3,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не используйте устройство, если ваши руки или ноги мокрые, прежде следует вытереть мокрые части тела.
10. Не включайте массажер более 60 минут подряд без перерыва. Это может привести к повреждению устройства. По истечении этого времени сделайте перерыв на 15 минут во избежание перегрева устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

12. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в отверстия, расположенные на дне устройства. Не накрывайте прибор. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания.
19. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
20. Массажер предназначен только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87