

ПАСПОРТ

ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ НАСТЕННЫЙ «BIONIK» BIO ЭКОНОМ

Устройство дозирующее локтевое настенное (устройство) предназначено для подачи мелких порций растворов при обработке кожных покровов.

Устройства предназначены для применения в здравоохранении, на предприятиях пищевой отрасли, питания, торговли, на рынках, предприятиях бытового назначения, коммунальных объектах и в быту.

Устройство удобно в пользовании, снижает расход моющих или дезинфицирующих средств, а также обеспечивает повышение санитарно-гигиенических требований по сравнению с мытьем/поливом растворов из бутылок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Привод устройства - ручной.
2. Режим работы - многократный, циклический.
3. Доза нанесения 1,5 – 3 мл.
4. Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3,5 кг).
5. Масса устройства не более 0,6 кг.
6. Габаритные размеры с учетом рычага 300*225*100 мм.
7. Материал корпуса: ABS-пластик/Нержавеющая сталь AISI 304

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. Устройство | 1 шт |
| 2. Флакон пластиковый | 1 шт. |
| 3. Дюбель распорный 06x30 | 3 шт. |
| 4. Саморез 3,5x30 | 3 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Закрепите устройство к стене при помощи входящих в комплект поставки дюбелей и саморезов.

Перед установкой устройства обратите внимание на следующее:

- устройство должно быть расположено над раковиной или поддоном, для стекания капель с мокрых рук,
- под устройством, для удаления бутылки, должно быть свободное пространство не менее 15 сантиметров,
- над устройством должно быть свободное пространство не менее 3 сантиметров, для снятия устройства со стены,
 - высота крепления устройства 130- 135 сантиметров от пола, до верха корпуса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Вставьте бутылку с раствором в устройство, предварительно удалив крышку или пробку.

Нажатием на рычаг произведите несколько качков, для заполнения насосной системы, до появления первой порции жидкости из изогнутой трубки выдачи средства.


После этого устройство готово к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг будет выдаваться мерная доза жидкости.

Величину дозы жидкости можно выбрать, меняя силу нажатия на рычаг, тем самым ограничивая его ход. Чем меньше ход, тем меньше доза.

Нажатие на рычаг при дезинфекции рук производить локтем.

Длительные интервалы бездействия устройства не приводят к сбою его работы, если бутылка остается заполненной.

Быстрая замена пустой бутылки на полную обеспечивает готовность устройства к выдаче дозы жидкости без холостых прокачек.

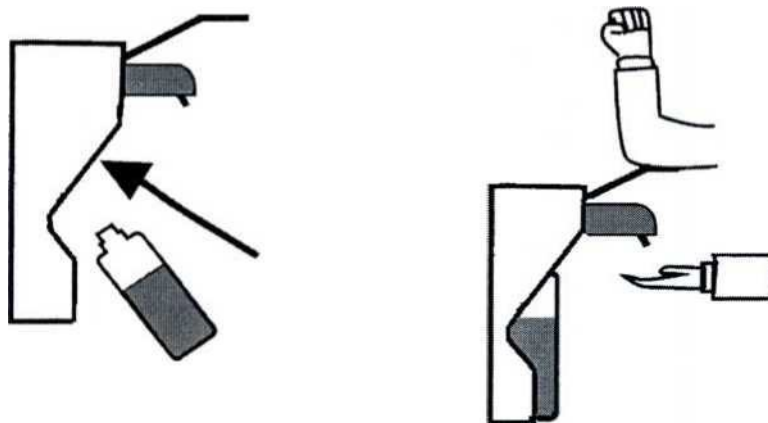

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Регулярно очищайте наружные поверхности устройства теплой мыльной водой. При необходимости проводите дезинфекцию наружных поверхностей 3 % раствором перекиси водорода.

После чистки и дезинфекции наружные поверхности вытереть насухо.

Не пользуйтесь абразивными или содержащими хлор очистителями.

При засорении клапанов необходимо промыть насосную систему без разборки устройства. Для этого нужно залить в бутылку горячую (60-70°C) воду и произвести многократные нажатия на рычаг, до восстановления нормальной работы устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство дозирующее локтевое настенное Bio эконом

номер партия №

соответствует техническим условиям ТУ 22.29.23-001-

ОКПО-2019 принято ОТК и признано годным к эксплуатации.