

Руководство
по эксплуатации

**Алкотестер
электрохимический
ГЕНТ-1**

ГЕНТ

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	4
Основные компоненты	4
Меры предосторожности	5
Эксплуатация.....	5
Устранение неисправностей.....	9
Транспортировка, хранение, утилизация	10
Гарантийные обязательства.....	11
Особые отметки.....	12
Адреса сервисных центров	14

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

Данное руководство содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания ударного пневмогайковерта.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Срок хранения — 5 лет.

Назначение

Алкотестер электрохимический предназначен для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека (рассчитывается по выдыхаемому воздуху). Прибор может использоваться в целях проверки большого количества людей.

Для достижения необходимой точности показаний алкотестер снабжен системой контроля продувания.

С помощью алкотестера можно получить три показателя измерений. В ‰ВАС, или промилле, отражается концентрация спирта в граммах на 1 000 мл крови. В ‰ВАС отражена та же информация, но в соотношении к 100 мл крови. Третий показатель – мг/л – содержание спирта в выдыхаемом воздухе.

Комплектность

1. Алкотестер – 1 шт.
2. Мундштук – 10 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	ГЕНТ-1
Питание	AAA/мизинчиковая (R03;LR03;FR03)
Мундштук	есть
Многоразовый	да
USB-порт	нет

Основные компоненты



Меры предосторожности


- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности и эксплуатации.
- Во избежание повреждения датчика не допускайте попадания спирта или любой другой жидкости внутрь устройства.
- Частота использования устройства и концентрация алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе влияют на чувствительность и срок службы датчика. При более частом использовании и более высокой концентрации алкоголя чувствительность датчика снижается, а срок службы сокращается.
- Показания алкотестера не являются доказательными – не следует садиться за руль после употребления алкоголя независимо от показаний прибора.
- Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за решения, принимаемые на основании результатов тестирования.

Эксплуатация


Внимание! Перед использованием изделия прополощите рот водой. Необходимо выждать не менее 20 минут после употребления алкоголя, пищи или курения.

Включение изделия


1. Установите 2 батарейки типа AAA в батарейный отсек.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для включения. Прибор автоматически перейдет в режим самотестирования.

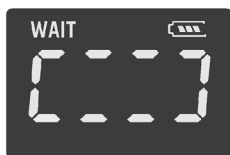

3. После самопроверки датчика устройство готово к тестированию. На дисплее мигает индикатор «BLOW», раздаются звуковые сигналы. Выполните измерение в течение 25 секунд, в противном случае устройство автоматически отключится.

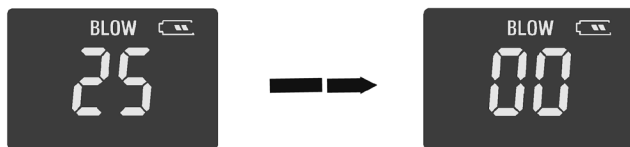

4. При тестировании непрерывно продувайте мундштук в течение 5 секунд до тех пор, пока звуковой сигнал не прекратится и не отобразится полная строка состояния. При успешном отборе пробы раздаются два коротких звуковых сигнала и на дисплее отображается соответствующий результат теста.

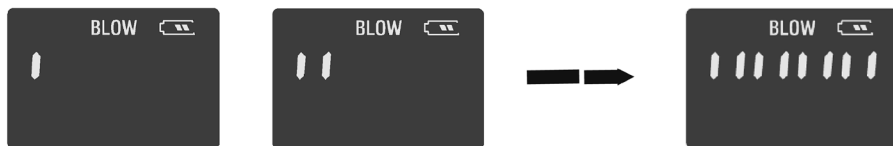

5. Во время тестирования при прерывании продувки на дисплее отобразится сообщение «Err». Для начала нового теста необходимо снова кратко нажать кнопку .



Переключение показателей измерения

В режиме отображения результатов теста кратковременно нажмите кнопку , чтобы переключить показатели измерения между мг/л, ‰BAC, ‰BAC.



Отображение результатов теста

- Если результат теста превышает установленный допустимый уровень, световой индикатор загорается красным и мигает 10 раз, при этом раздается звуковой сигнал.
- Если результат теста ниже установленного допустимого уровня, световой индикатор загорается зеленым светом.
- Диапазон показаний составляет от 0,00‰BAC до 4,00‰BAC.
- Если значение превышает 4,00‰BAC, на дисплее появится надпись «4,00‰BAC».
- Если значение ниже 0,05‰BAC, на дисплее появится надпись «0,00‰BAC».

Результаты теста при допустимом уровне = 0,50‰BAC:



Установка допустимого уровня

Если вам нужно изменить допустимый уровень, в режиме самотестирования дважды нажмите кнопку , затем кратко нажмите кнопку , чтобы выбрать один из вариантов (b2, b3, b5, b8). Далее кратко нажмите кнопку , чтобы начать новый тест.




Допустимый уровень	Результат теста: C	Оповещение
b2	$C < 0,20\text{‰BAC}$ или $0,020\text{‰BAC}$ или $0,100\text{мг/л}$	нет
	$C \geq 0,20\text{‰BAC}$ или $0,020\text{‰BAC}$ или $0,100\text{мг/л}$	да

b3	C < 0,30‰BAC или 0,030%BAC или 0,150мг/л	нет
	C ≥ 0,30‰BAC или 0,030%BAC или 0,150мг/л	да
b5	C < 0,50‰BAC или 0,050%BAC или 0,250мг/л	нет
	C ≥ 0,50‰BAC или 0,050%BAC или 0,250мг/л	да
b8	C < 0,80‰BAC или 0,080%BAC или 0,400мг/л	нет
	C ≥ 0,80‰BAC или 0,080%BAC или 0,400мг/л	да

Просмотр записей

Устройство записывает 50 последних результатов тестирования. Удерживайте нажатой кнопку **(M)** в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим записи. Затем нажмите кнопку **(M)** несколько раз, чтобы просмотреть последние сохраненные записи (максимум 50 записей), номер записи и результат теста будут мигать на дисплее попеременно.

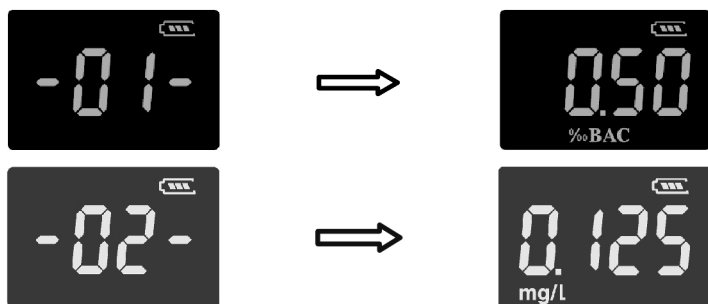


Внимание! При извлечении батареек сохраненные записи будут удалены.

Выключение изделия

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, пока дисплей не погаснет.

В режиме просмотра результатов теста и просмотра записей устройство автоматически выключается после 30 секунд бездействия.

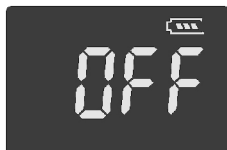

Низкий уровень заряда батареек

При низком уровне заряда батареек мигает индикатор «Lob» и раздается звуковой сигнал.

После того, как индикатор «Lob» мигнет 10 раз, устройство автоматически выключится. Следует заменить батарейки.



Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Изделие не включается	Низкий заряд батареек.	Замените батарейки.
	Неправильно вставлены батарейки.	Вставьте батарейки правильно.
	Кнопка  удерживалась менее 2 секунд.	Удерживайте кнопку  2 секунды.

Err	Прерывание продувки во время тестирования.	Повторите тестирование, продувка должна длиться 5 секунд.
Результаты двух тестов, выполненных за короткое время, сильно отличаются	Тестирование проведено слишком рано.	Необходимо выждать не менее 20 минут после употребления алкоголя, пищи или курения.
	Алкоголь, оставшийся во рту, влияет на измерения.	Перед тестированием прополощите рот водой.

Внимание! На переносимость алкоголя влияют такие факторы, как наследственность, телосложение, пол и вес. Таким образом, разные люди могут выпить одинаковое количество алкоголя, однако, результаты теста при этом будут отличаться.

После употребления алкоголя в крови происходит процесс всасывания и разложения алкоголя, поэтому содержание алкоголя в крови может колебаться в течение нескольких минут.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ и с обязательным соблюдением мер предосторожности, предписанных при перевозке хрупких грузов.

Хранение

Храните устройство в коробке, избегайте воздействия солнечных лучей и влаги.


Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.


Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

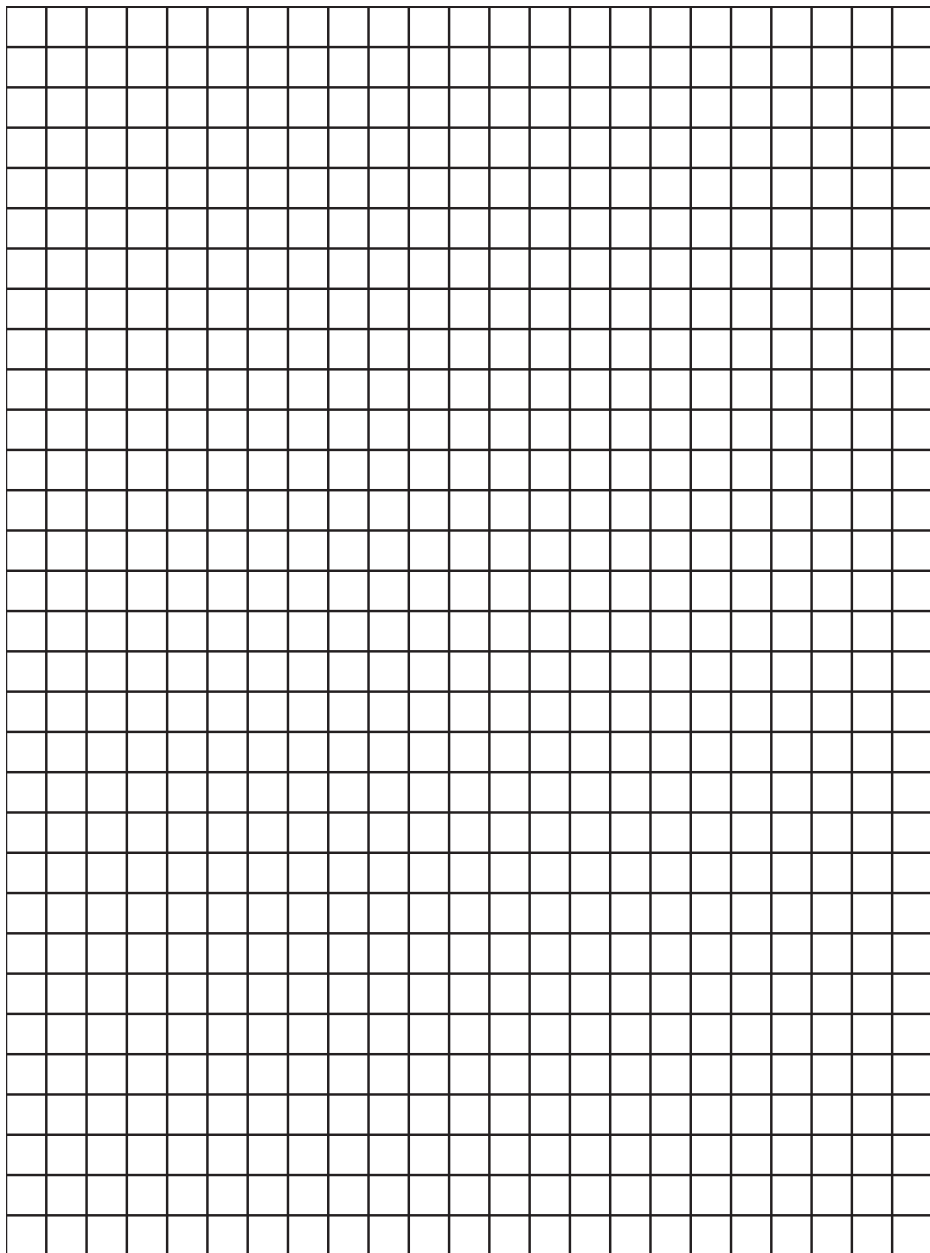

Особые отметки

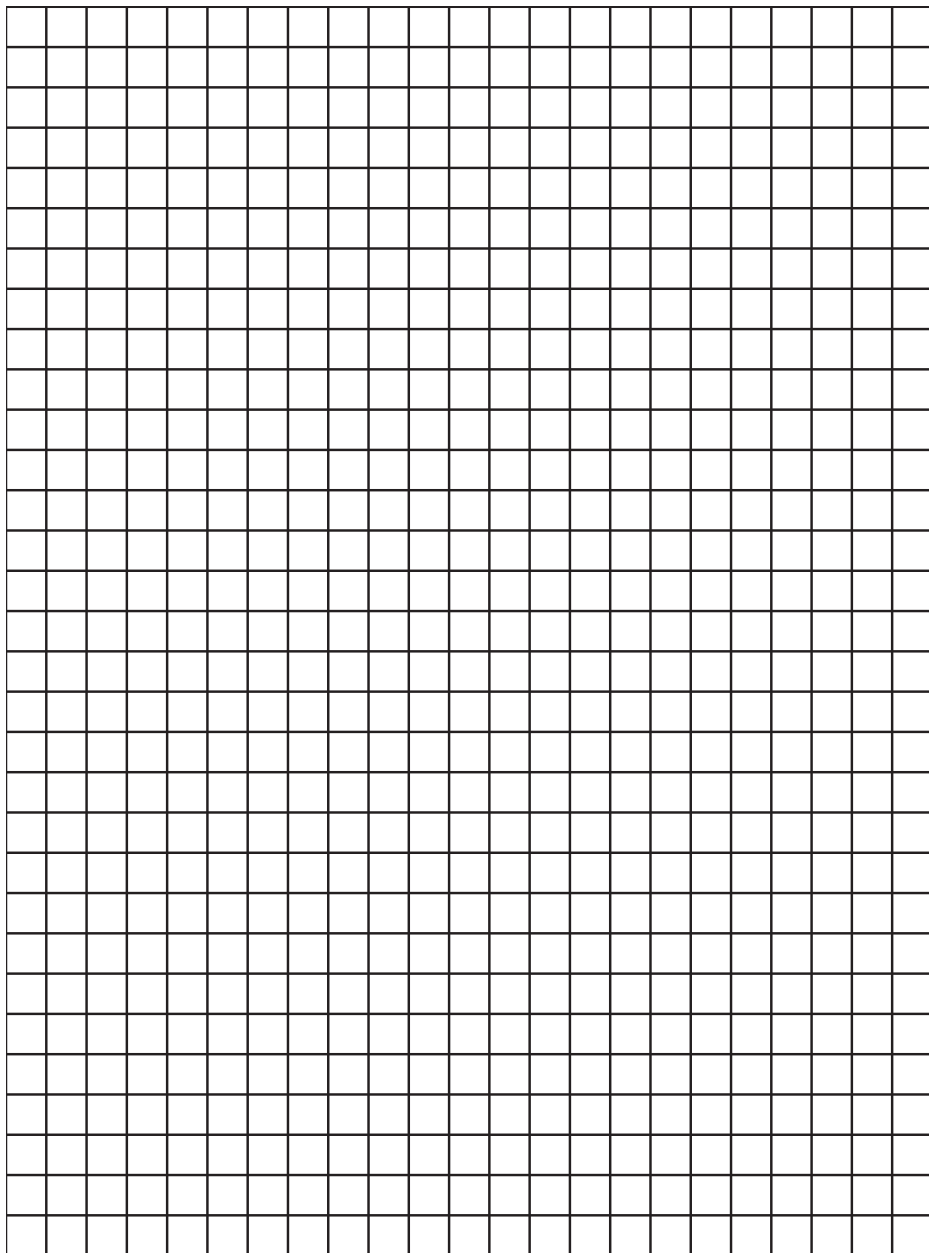

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте

vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70