

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБЭСТ»



ПАСПОРТ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный
«Анти-Бакт»

по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023[□]

в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации

«Анти-Бакт 20»

«Анти-Бакт 50» □



г. Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....	5
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ.....	7
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	8
8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
10. МАРКИРОВКА.....	10
11. УПАКОВКА	11
12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ	11
13. ГАРАНТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	12
14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	12
15. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ.....	12
16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	13
17. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1.....	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Паспорт (далее по тексту Паспорт) является документом, удостоверяющим гарантированные Предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики изделия «Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023» в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50». Облучатели модификации «Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50» выполнены в одном и том же корпусе, но имеют разные технические характеристики.

Данный документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы Облучателя и устанавливает правила эксплуатации, транспортирования и хранения Облучателя, соблюдение которых обеспечивает его нормальное функционирование.

Эксплуатация Облучателя должна производиться в соответствии с настоящим Паспортом и МУ 2.3.975-00.

ВНИМАНИЕ! Пользование Облучателем до ознакомления с настоящим Паспортом не допускается!

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Облучатель-рециркулятор является бытовым прибором, предназначенным для антимикробной, антибактериальной и противовирусной обработки воздуха в помещениях, может работать в присутствии людей.

Облучатели-рециркуляторы устанавливаются в жилых, бытовых, офисных, производственных и общественных помещениях; в детских, учебных, спортивных учреждениях; в парикмахерских, в помещениях торговли, предприятиях пищевой промышленности и общественного питания (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.), а так же в местах массового пребывания людей. Облучатели-рециркуляторы является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем.

1.2. Облучатель укомплектован безозонными ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, испускающими ультрафиолетовое излучение преимущественно с длиной волны 253,7нм.

1.3. Облучатель в исполнении «Анти-Бакт» имеет 2 модификации:

- 1) «Анти-Бакт 20» использование в присутствии людей в режиме рециркуляции воздуха
- 2) «Анти-Бакт 50» использование в присутствии людей в режиме рециркуляции воздуха

1.4. Облучатели модификации «Анти-Бакт» имеют два варианта настенного крепления:

- 1) вертикальное;
- 2) горизонтальное.

1.5. Показания и противопоказания к применению

1.5.1. **Показания:** обеззараживания воздуха на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания в присутствии людей.

1.5.2. **Противопоказания:** не выявлены.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50» (далее по тексту Облучатель) соответствует требованиям ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 и комплектам конструкторской документации.

Электропитание осуществляется от сети переменного тока частотой 50Гц и номинальным напряжением (230 ± 10%)В.

Рекомендован круглосуточный режим работы, обеспечивающий непрерывное обеззараживание воздуха в помещении.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 обеспечивает эффективность обеззараживания воздуха до 99%.

Технические характеристики и значения производительности по воздуху Облучателя-рециркулятора бактерицидного «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 в исполнении «АНТИ-БАКТ 20» модификации «Анти-Бакт 50» соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики Облучателя-рециркулятора бактерицидного «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023» в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50»

Технические характеристики							
Изделие	Питание сети				Источник излучения (тип лампы)		
Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023	(230±10%) В; 50 Гц				Лампы фирмы «LTC15T8, LTC30T8» или аналоги		
Исполнения	Производительность по воздуху, (м³/ч)	Габаритные размеры, (мм)			Масса, (кг), не более	Мощность, (ВА), не более	Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А), не более
		Д	Ш	В			
АНТИ-БАКТ «Анти-Бакт 20»	До 75	155	140	560	4	200	41
АНТИ-БАКТ модификация «Анти-Бакт 50»	До 170	155	140	560	4	200	41
Эффективность обеззараживания и очистки воздуха							
Исполнение	Кол-во ламп, (шт.)	Мощность лампы, (Вт)		Бактерицидный поток, (Вм), не менее	Суммарный бактерицидный поток, (Вм), не менее		Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus
АНТИ-БАКТ «Анти-Бакт 20»	1	15		7	7		99,0%
АНТИ-БАКТ модификация «Анти-Бакт 50»	1	30		10	10		99,0%

- 2.1. Время выхода облучателя на рабочий режим не более 1 мин.
- 2.2. Средний срок службы не менее 2 лет.
- 2.3. Класс потенциального риска применения 1 по ГОСТ 31508.
- 2.4. Условия эксплуатации Облучателя таблица 2.

Таблица 2.

Наименование показателя			Исполнение изделий УХЛ 4.2
1			2
Значение температуры воздуха при эксплуатации, (°C)	Рабочее	верхнее	+35
		нижнее	+10
	Предельное рабочее	верхнее	+40
		нижнее	+1
Относительная влажность, (%)	Среднегодовое значение		60% по 20°C
	Верхнее значение		80% по 25°C*
Абсолютная влажность, среднегодовое значение, (г*м³)			10

2.5. Наружные поверхности облучателя допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей в соответствии с инструкцией по применению к этим средствам, например, «Комбидез».

2.6. Облучатель в продолжительном режиме должен обеспечивать работу в течение всего времени, необходимого для поддержания микробной осемененности воздуха на уровне нормативных показателей, в зависимости от функциональных требований к помещению и количества находящихся в нем людей.

ВНИМАНИЕ! В Облучателе установлены ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Помните, ультрафиолетовое излучение вредно для глаз и кожи. Прямое воздействие лучей может вызвать ожоги глаз и эритему кожи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Открывать крышку при работающем Облучателе. При техническом обслуживании и ремонте, в случае необходимости с работающими лампами, необходимо применять защитные очки с УФ фильтрами, лицевые, маски, перчатки и другие средства защиты. В бактерицидных лампах содержится ртуть – при установке и замене ламп соблюдать осторожность и не допускать механического повреждения колбы.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки «Облучателя-рециркулятора бактерицидного «АНТИ-БАКТ» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023»

Наименование оборудования	Обозначение документации	Кол-во, (шт.)
1	2	3
Облучатель-рециркулятор бактерицидный «АНТИ-БАКТ» по ТУ 28.25.14006-23550507-2023» исполнение «АНТИБАКТ » модификация «Анти-Бакт 20» и «Анти-Бакт 50»	ТУ 28.25.14-006-23550507-2023	1
Сопроводительная документация		
1. Паспорт		1

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Корпус Облучателя модификации «Анти-Бакт 20» и «Анти-Бакт 50» выполнен из металла с полимерным покрытием. Металл обеспечивает высокую жесткость изделия и его

стойкость к ударным нагрузкам. Покрытие металлического корпуса обладает химической стойкостью, а также стойкостью к атмосферным воздействиям.

4.2. На корпусе имеются четыре отверстия для крепления Облучателя к стене.

Конструкция корпуса Облучателя обеспечивает крепление его к стене в вертикальном или горизонтальном положении.

4.3. В корпусе Облучателя установлены:

- 1) бактерицидные лампы;
- 2) аппараты пускорегулирующие;
- 3) вентилятор;
- 4) кнопка ВКЛ\ВЫКЛ

4.4. Облучатель укомплектован безозонными бактерицидными лампами, принцип работы которых основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм, губительным для микроорганизмов. Колбы ламп выполнены из специального стекла, которое задерживает излучение с длиной волны менее 200нм, вызывающее образование озона в воздушной среде.

4.5. Шнур питания трехжильный с двухполюсной вилкой с заземляющим контактом.

4.6. В Облучателе бактерицидный поток от безозонных бактерицидных ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве. При этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентилятора через зону с источниками ультрафиолетового излучения.

4.7. Внешний вид Облучателя показан на рисунке 1.



Рис.1 «Облучатель-рециркулятор бактерицидный «АНТИБАКТ»

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К эксплуатации Облучателя допускается персонал, изучивший паспорт и прошедшие инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».

5.2. Использование Облучателя требует строго выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, и паров ртути.

5.3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт Облучателя должен производиться лицами, имеющими специальную подготовку в соответствии с «Правилами техники безопасности по эксплуатации электроустановок», ПУЭ и настоящим документом.

ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить ремонт Облучателя, включенного в сеть!

5.4. На Облучатель распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется с напряжением 220В и частотой 50Гц.

5.5. Облучатель должен быть закреплен на стене не ниже, чем 1,5-2м от пола.

5.6. Проверка годности ламп должна производиться с **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** использованием защитных средств (лицевая маска, очки с защитными УФ-фильтрами, перчатки и т.д.), полностью защищающих глаза, слизистые и кожу человека от облучения ультрафиолетовым излучением.

5.7. Облучатель должен быть заземлен через шнур питания трехжильный с двухполюсной вилкой с заземляющим контактом.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать и эксплуатировать Облучатель в отсутствии или при неисправности заземления!

5.8. При замене ламп и стартеров, устранении неисправностей, дезинфекции и санитарной обработке наружных поверхностей и бактерицидных ламп Облучатель должен быть отключен от сети электропитания.

5.9. Облучатель не защищен от прямого попадания воды. При работе с Облучателем не допускается попадание воды на корпус Облучателя.

5.10. Лампы, используемые в Облучателе не способны генерировать озон. Данный тип ламп изготавливается из увиолевого стекла, которое полностью блокирует озonoобразующую составляющую ультрафиолетового спектра (185 нм). Запах, который выделяется при начальном запуске лампы и первых 100 часах ее работы (возможно менее), связан с взаимодействием бактерицидного ультрафиолетового излучения (253,7 нм) с органическими частицами на поверхности колбы лампы и стенках прибора, а так же клеем-мастикой, которым фиксируются цоколи лампы. Присутствие запаха в течение первых 100 часов работы считается допустимым для ламп низкого давления выполненных из увиолевого стекла, вредных для здоровья человека веществ не выделяется.

5.11. В случае обнаружения характерного запаха озона немедленно отключить питание Облучателя от сети, удалить людей из помещения, включить вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона. Затем включить Облучатель и через час непрерывной работы (при закрытых окнах и отключенной вентиляции) провести замер концентрации озона в воздушной среде. Если будет обнаружено, что концентрация озона превышает ПДК, то прекратить дальнейшую эксплуатацию Облучателя, выявить озонирующие лампы и заменить их.

5.12. Контроль содержания озона в воздухе производить в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

5.13. Техническое обслуживание и ремонт Облучателя должны производиться лицами, имеющими специальную подготовку.

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Облучатель удовлетворяет требованиям защиты от излучения и помехоустойчивости ТР ТС 020/2011.

ВНИМАНИЕ! Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на Облучатель.

7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1. Извлечь Облучатель из транспортной тары.
- 7.2. Проверить комплектность Облучателя и отсутствие видимых дефектов.
- 7.3. После транспортировки или хранения Облучателя в условиях отрицательных температур перед проверкой работоспособности Облучатель необходимо выдержать в помещении при температуре +25°(±10°) не менее 4 часов.
- 7.4. Подготовить посадочные места для крепления Облучателя к стене.
- Высота крепления Облучателя к стене (от пола) должна быть не менее 1,5-2 м. Облучатель размещать таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходил беспрепятственно. Избегать установки в углах помещения, где образуются застойные зоны.
- 7.5. Включить вилку шнура питания в сеть. Перевести клавишу выключателя «Сеть» в положение «I».

8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8.1. Облучатель в продолжительном режиме обеспечивает работу в течение всего времени, необходимого для поддержания микробной обсемененности воздуха на уровне нормативных показателей, в зависимости от функциональных требований к помещению и количества находящихся в нем людей.
- Режим работы Облучателя - непрерывный.
- 8.2. Облучатели размещают равномерно по периметру помещения таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно.
- 8.3. При включении Облучателя на ограниченный период времени минимальная продолжительность его работы определяется таким образом, чтобы обеспечивать как минимум однократное прохождение всего объема воздуха в помещении через Облучатель.
- ВНИМАНИЕ! Применение Облучателя обеспечивает снижение уровня микробной обсемененности воздуха, находящегося в помещении, но не заменяет регулярного проветривания и текущих мероприятий по уборке и дезинфекции поверхностей.**
- 8.4. Время бактерицидной обработки помещений для подготовки их к функционированию в зависимости от категории и объема приведено в таблице 4.

Таблица 4. Время бактерицидной обработки помещений для подготовки их к функционированию в зависимости от категории и объема

Облучатель рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14 006-23550507 2023», в исполнении	Объем помещения, м³	Время работы для помещений класса чистоты в соответствии с Руководст Р3.5.190404, мин.			
		99,0% (помещения II категории)	95,0% (помещения III категории)	90,0% (помещения IV категории)	85,0% (помещения V категории)
«АНТИБАКТ» модификации «Анти-Бакт 20»	до 20	40	27	20	16
	до 30	60	40	30	24
	до 45	-	60	45	36
	до 60	-	-	60	49
	до 75	-	-	-	60
«АНТИБАКТ» модификации «Анти-Бакт 50»	до 50	40	27	22	18
	до 75	60	40	33	27
	до 105	-	60	46	37
	до 135	-	-	60	48
	до 170	-	-	-	60

- 8.5. Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры облучения проводить не реже 1 раза в 3 месяца. Для этого необходимо выполнить следующие действия,
- выключить переключатель «Сеть» и отключить Облучатель от сети;
 - снять крышку облучателя, отвернув винты крепящие ее к корпусу;
 - протереть колбы и внутренние поверхности камеры облучения салфеткой, увлажненной 70% этиловым спиртом;
 - включить Облучатель, соблюдая правила техники безопасности, приведенные в разделе 5 данного документа, визуально убедиться в работе ламп и выключить облучатель, нажав переключатель «Сеть»;
 - отключить Облучатель от сети;
 - установить съемную крышку, закрепив ее винтами.
- 8.6. Уровень помех облучателя не превышает действующих норм и допускает совместную работу облучателя с другим оборудованием.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. При проведении работ соблюдать требования «Правил технической эксплуатации установок потребителей». Техническое обслуживание производить службами или штатными специалистами, имеющими право осуществлять такого рода деятельность в соответствии с законодательством РФ. Работу производить специалистами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а также прошедшими инструктаж на рабочем месте по безопасности труда. При работе с источниками УФ излучения использовать средства защиты персонала от УФ излучения (см. раздел 7 данного документа).

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию выполнять только обученным персоналом, имеющим необходимую квалификацию. Все действия, выполняемые в рамках технического обслуживания: снятие и установка на место крышки рециркулятора, замена ламп, снятие и установка электрических патронов, должны выполняться при выключенном переключателе «Сеть» и отключенном от сети рециркуляторе. Для отключения рециркулятора от сети необходимо вынуть электрическую вилку кабеля питания из розетки.

9.2. Перед проведением проверки Облучателя произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на Облучатель.

9.3. При проведении внешнего осмотра проверить:

9.3.1. отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность;

9.3.2. наличие и прочность крепления органов управления и сигнализации, состояние сетевого шнура и вилки, исправность заземления.

9.4. Проверку исправности и прочности заделки сетевого шнура производить внешним осмотром при его легком покачивании и прокручивании вблизи мест заделки без применения специального инструмента и оборудования. На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты.

Периодичность проверки – 1 раз в 6 месяцев

9.5. Проверка исправности заземления проводить внешним осмотром: убедиться в том, что жила защитного заземления (желто-зеленого цвета) шнура питания надежно соединена с внутренним зажимом (болтом) заземления.

Периодичность проверки – 1 раз в 6 месяцев.

9.6. В случае обнаружения неисправностей Облучателя или его отдельных узлов дальнейшую эксплуатацию Облучателя не допускать, произвести его ремонт или замену.

9.7. По окончании ресурса лампы, заменить бактерицидные лампы.

10. МАРКИРОВКА

Маркировка «Облучателя-рециркулятора бактерицидного «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023» выполнена в виде приклеенного шильда (этикетки) и содержит основные данные (таблица 5).

Таблица 5.

Требования	Значение
1	2
Наименование предприятия-изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ»
Товарный знак предприятия-изготовителя	
Наименование и исполнение	Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023» исполнение «АНТИ-БАКТ»
Модификации	«Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50»
Номер облучателя по системе нумерации предприятия-изготовителя	Указывается заводской номер предприятия-изготовителя
Год выпуска	Зависит от даты выпуска
Номинальное напряжение питания	~230В±10%
Частота переменного тока	50Гц
Номинальная потребляемая мощность, не более (ВА)	600
Символ «Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам» для указания на опасность воздействия ультрафиолетового облучения	
Условное обозначение типа защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 50267.0	
Обозначение технических условий	ТУ 28.25.14-006-23550507-2023

Надписи и знаки на ярлыках плоские, нанесены типографским способом, имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость надписей к воздействию факторам внешней среды в процессе эксплуатации.

Маркировка потребительской тары изделия содержит следующие данные (Таблица 6).

Таблица 6.

Требования	Значение
1	2
Маркировка потребительской тары	
Наименование и адрес предприятия-изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ» Российская Федерация, 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, корп.52. каб.1
Наименование или обозначение облучателя	Облучатель-рециркулятор бактерицидный «АНТИ-БАКТ» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023» исполнение «АНТИ-БАКТ»
Модификации	«Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50»
Год и месяц упаковывания	Зависит от даты выпуска
Маркировка транспортной тары	
Манипуляционные знаки: «Хрупкое - осторожно!», «Верх», «Беречь от влаги», «Предел по количеству ярусов в штабеле»	

11. УПАКОВКА

Облучатель упакован в коробку, изготовленную по ГОСТ 12301-2006. Эксплуатационная документация упакована в пакеты из полиэтиленовой пленки.

12. ХРАНИЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

- 14.1. Хранение.
- 14.1.1. Облучатель хранить в упакованном виде в упаковке Предприятия-изготовителя в закрытом помещении в условиях хранения по ГОСТ 15150-69.
- 14.1.2. Эксплуатационную документацию хранить вместе с Облучателем.
- 14.1.3. В окружающем воздухе не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
- 14.2. Транспортирование.
- 14.2.1. Облучатели могут транспортироваться в индивидуальной потребительской таре изготовителя всеми видами транспорта, в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов и указанной на упаковке маркировкой.
- ВНИМАНИЕ! Хранение и транспортирование Облучателя без упаковки Предприятия-изготовителя не гарантирует сохранность Облучателя. Повреждения Облучателя в результате хранения и транспортирования без упаковки устраняются потребителем.**

- 14.3. Утилизация.
- 14.3.1. Утилизация Облучателя осуществляется в следующем порядке:
- 1) отслужившие лампы должны быть утилизированы в соответствии Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности;
 - 2) Облучатель без ламп и стартеры относятся к отходам класса «А» и утилизируется, как эпидемиологически неопасные (бытовые) отходы.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1. Изготовитель гарантирует соответствие Облучателя требованиям технических условий ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи Облучателя.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на лампы бактерицидные. Срок службы лампы 9 000 часов.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет Облучатель или его части при предъявлении гарантийного талона.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае механических повреждений корпуса Облучателя, шнура электропитания.

15.3. При отказе Облучателя в течение гарантийного срока следует составить Акт с указанием характера неисправности и времени выхода Облучателя из строя. Направить Облучатель изготовителю, приложив гарантийный талон и Акт.

15.4. Гарантийный срок эксплуатации на лампы бактерицидные – 28 дней со дня продажи Облучателя.

15.5. Гарантийный срок хранения Облучателя – 36 месяцев.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

16.1. Рекламации принимаются при соблюдении требований к условиям транспортирования и хранения, монтажу и эксплуатации Облучателя, а также при наличии в журнале эксплуатации данных о техническом обслуживании и регламентных работах.

16.2. В случае отказа Облучателя или его неисправности в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, владелец Облучателя должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

- 1) заявку на гарантийный ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца Облучателя;
- 2) дефектную ведомость с указанием характера неисправности (ей) и времени выхода Облучателя из строя;
- 3) гарантийный талон.

16.3. Реквизиты Предприятия-изготовителя:

Наименование предприятия-изготовителя:	Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ»
Юридический адрес:	630049, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, корп.52. каб.1
Почтовый адрес:	630123, г.Новосибирск, а/я 100
Адрес производства:	630049, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, корп.52
Телефон/факс:	+7 (383) 303-41-63
E-mail:	sibest@inbox.ru

15. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ



Является товарным знаком, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ»

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный « Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023, в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50» «АНТИ-БАКТ» заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023, в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт», «Анти-Бакт 50» «АНТИ-БАКТ» заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 28.25.14-006-23550507-2023 упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Штамп Упаковщика

Дата выпуска _____

Облучатель – рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023, в исполнении «АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт 20», «Анти-Бакт 50» заводской номер _____

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ»

Российская Федерация, 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, корп.52. каб.1

E-mail: sibest@inbox.ru

Почтовый адрес: 630123, г.Новосибирск, а/я 100

Телефон/факс: +7 (383) 303-40-90

Телефон отдела продаж: +7 (383) 303-41-63

Сайт: www.antibact.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023,
в исполнении
«АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт20», «Анти-Бакт 50» заводской номер _____

Номер и дата выпуска _____
(заполняется Предприятием-изготовителем)

Приобретён _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введён в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание Предприятия-изготовителя (ООО «СИБЭСТ»)
«_____» _____ 20____ г.

Подпись и печать руководителя Предприятия-изготовителя (ООО «СИБЭСТ»)

Подпись и печать руководителя организации-владельца _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Анти-Бакт» по ТУ 28.25.14-006-23550507-2023,
в исполнении
«АНТИ-БАКТ» модификации «Анти-Бакт20», «Анти-Бакт 50» заводской номер _____

Номер и дата выпуска _____
(заполняется Предприятием-изготовителем)

Приобретён _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введён в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание Предприятия-изготовителя (ООО «СИБЭСТ»)
«_____» _____ 20____ г.

Подпись и печать руководителя Предприятия-изготовителя (ООО «СИБЭСТ»)

Подпись и печать руководителя организации-владельца _____

Наименование предприятия-
изготовителя:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Адрес производства:

Телефон/факс:

E-mail:

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ»

630049, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, корп.52,
каб.1

630123, г.Новосибирск, а/я 100

630049, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, корп.52
+7 (383) 303-41-63

sibest@inbox.ru

